

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 眼アプリケーション 10175000

MMI アイスピア TENDER

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

1. 再使用禁止、再滅菌禁止。
2. 術中、乾燥状態にある部位で使用しないこと
〔組織を傷つけるおそれがあるため〕。
3. 眼科手術において適用対象組織を特定してあるものは特定組織以外の組織には絶対に使用しないこと。
4. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL：0725-53-5546



製造業者：フォーユーメディカル社 中華人民共和国
HuiZhou Foryou Medical Devices Co., LTD.

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真



ISO 10993-1:2009 に準ずる。

2. 原材料

先端：ポリビニルアセタール

3. 原理

先端のスポンジ部分が液・排出物等を吸収・除去する。

【使用目的又は効果】

木材、軟性金属又は合成材料製の細いロッドの方端に綿撤糸または合成繊維等が取り付けられている機器で眼科用のものをいう。綿撤糸または合成繊維等の吸収材をスティック状に成型したスポンジ様のものもある。

【使用方法等】

1. 使用方法

柄を持ち、先端のスポンジ部分を対象箇所に対てる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

強く当てすぎないこと。

【使用上の注意】

その他の注意

- 1) 使用前に、汚れ・破損等を点検すること。
- 2) いったん開封した場合は未使用であっても廃棄すること。
- 3) 使用後は、感染防止に留意し、医療廃棄物として適切な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間：5 年〔自己認証（当社データ）による〕。