

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用洗浄用注射筒 35390000

MMI バルブシリンジ 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉
再使用禁止、再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状
 - 1) 容量: 60mL
 - 2) 代表的写真



2. 原材料
シリンジ: ポリプロピレン
バルブ: スチレン-エチレン-ブチレン-スチレンブロック共重合体
3. 原理
弾力性のあるバルブを手で握って圧迫すると、その容積が減じる。圧迫を緩めると減じたバルブの復元力によって内部に陰圧が発生する。その際シリンジ先端が生理食塩水中にあれば、その陰圧によって生理食塩水がシリンジ内に流入する。流入した生理食塩水はバルブを手で再度圧迫することでシリンジ外に吐出される。

【使用目的又は効果】

一方の端にバルブが装着され、もう一方にノズルが付いている硬質プラスチック製の筒からなる器具で、主に体腔の洗浄・フラッシングに使用される。

【使用方法等】

- 1) 本品を滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 使用前に空気を模擬的に吸い込み吐き出させる。このとき吐出音を確認する。
- 3) バルブを手で握ったままシリンジ先端を生理食塩水中に入れる。
- 4) 握った手を緩めて、生理食塩水を吸引する。
- 5) バルブを再度圧迫して生理食塩水を噴出する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 滅菌包装に、破損が見られた場合は使用しないこと。
- 2) 有機溶媒との接触は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 滅菌有効期間
3年 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器 株式会社**
TEL: 0725-53-5546



製造業者: パシフィック ホスピタル サプライ社 台湾
Pacific Hospital Supply Co., Ltd.