

機械器具 34 医療用刀  
管理医療機器 単回使用メス 35130002

## スワンモートンディスプレイザブルスカルペル

### 再使用禁止

#### \*【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

ステンレス鋼又はカーボン鋼に過敏症がある患者には使用しないこと。

〈使用方法〉

1. 再使用禁止、再滅菌禁止。
2. 電気メスを用いた接触凝固は行わないこと [術者が感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある]。

- 2) いったん開封した場合は未使用であっても廃棄すること。

#### \*【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間: 5年 [自己認証(当社データ)による]

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器株式会社**  
TEL: 0725-53-5546



#### \*\*【形状・構造及び原理等】

1. 形状  
刃の形状の違いにより数種類がある。

代表的写真



2. 原材料  
刃: ステンレス鋼又はカーボン鋼
3. 原理  
先端部の刃をハンドル部の操作によって下方に押し付けるように動かすことで、身体組織の切断・切離並びに検査・研究用試料及び物体を切断する。

#### 【使用目的又は効果】

外科的手術、切離並びに検査・研究用試料及び物体の切断に使用する。

#### \*\*【使用方法等】

1. 使用方法
  - 1) 術式及び切開部位に適切な形状を選択する。
  - 2) 滅菌包装より無菌的に取り出して使用する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
  - 1) 刀面の取り扱いに注意すること [刀面が鋭利なため]。
  - 2) 本品が破損した場合、破片が体内に残らないようにすること [術後合併症が起こる可能性がある]。
  - 3) 使用時に、必要以上の強い力(応力)を加えないこと [破損、曲がり等の原因になる可能性がある]。

#### \*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 1) 本品をぶついたり、落下等の衝撃を与えないこと [破損する原因となる]。
  - 2) 適切な形状の刃を選択すること。
2. その他の注意
  - 1) 使用前に、汚れ・破損・変形・刃にガタがないか等を点検すること。

製造業者: スワンモートン社 イギリス  
Swann-Morton Limited