

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDN 36125000


トップ ネラトンカテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

【形状・構造及び原理等】
<構造図(代表図)>

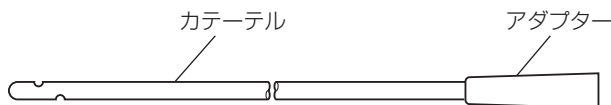

- ・アダプターは付属しない場合がある。
- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

（材質）

カテーテル	ポリ塩化ビニル
アダプター	ポリ塩化ビニル

＊【使用目的又は効果】

- ・尿道経由で膀胱に挿入又は留置し、導尿に用いること。

【使用方法等】

1. 尿道口の周囲を十分に消毒する。
2. カテーテル先端部及び尿道口にキシロカインゼリー等の潤滑剤をぬる。
3. カテーテルをゆっくりと尿道口より挿入する。
4. 尿の排出終了後、ただちにカテーテルを抜く。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・導尿以外の目的に使用しないこと。
- ・使用前に、滅菌蒸留水等で通水を確認すること。
- ・尿道への挿入時に困難を認めた場合には、無理な挿入は止めること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・カテーテルを鉗子等でつまんだり、ハサミや刃物等で傷つけないこと。[漏れやカテーテル破断のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

<有効期間>

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。
（自己認証により設定）



