

体外診断用医薬品

第Ⅱ凝固因子キット トロンボチェック血液凝固第Ⅱ因子定量キット
製造販売届出番号 28E1X80030000062

Imidazole Buffer

イミダゾール緩衝液

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用医薬品です。これ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際には、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
- * 3. 電子添文以外の使用方法については保証をいたしかねます。
- * 4. 測定に使用する機器の電子添文および取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

イミダゾール緩衝液

- * **【使用目的】**
各キットの電子添文をご参照ください。
- * **【測定原理】**
各キットの電子添文をご参照ください。

【操作上の注意】

- * **測定試料の性質、採取法**
各キットの電子添文をご参照ください。
- * **妨害物質・妨害薬剤**
各キットの電子添文をご参照ください。
- その他**
本品をサンプルカップ等に分注した場合は、速やかに測定を行ってください。
自動血液凝固測定装置を使用する場合は、シスメックスの推奨する装置を使用し、消耗品は指定のものを必ずご使用ください。
シスメックスの推奨する試薬および試料以外との組み合わせでは、使用しないでください。

【用法・用量(操作方法)】

試薬の調製方法

使用前に、本品を常温に戻した後、そのまま緩衝液として使用してください。
本品の開封後の有効期間は密封した状態で、2～8℃および常温保存の場合8週間です。

必要な器具・器材・試料等

全自動血液凝固測定装置/専用キュベット

測定(操作)法

使用する装置の取扱説明書に従ってください。

- * **【測定結果の判定法】**
各キットの電子添文をご参照ください。
- * **【性能】**
各キットの電子添文をご参照ください。

【使用上又は取扱い上の注意】

取扱い上(危険防止)の注意

1. 本品は体外診断用のみに使用し、人体には絶対に使用しないでください。
2. 本品中にはアジ化ナトリウムが含まれています。誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合には、速やかに水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

使用上の注意

1. ラベルに表示されている使用期限内のものを使用してください。
2. 本品を凍結しないでください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
3. 本品をつぎ足して使用しないでください。
4. 本品は、気泡を生じないように、丁寧に扱ってください。気泡が生じると測定が正常に行われなくなることがあります。

廃棄上の注意

1. アジ化ナトリウムは鉛・銅等の金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、本品の廃棄の際には大量の水と共に流してください。
2. 廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制および各都道府県の条例等に留意して処理してください。

その他の注意

試薬の容器を再利用したり、他の目的に転用しないでください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法：2～8℃

有効期間：30カ月

【包装単位】

品目コード	製品名	規格
BH367139	イミダゾール緩衝液	25 mL × 12本

- * **【主要文献】**
各キットの電子添文をご参照ください。

【問合せ先】

シスメックス株式会社 カスタマーサポートセンター
神戸市西区室谷1-3-2 〒651-2241
Tel 0120-413-034



カタログ番号



使用期限



添付の文書参照

L0T

ロット番号



保存温度

ラベルに記載されている危険分類情報は、欧州規則(EC) No 1272/2008に基づく分類情報です。各国における危険分類については、安全データシートを参照してください。

** 製造販売元

シスメックス株式会社

神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 〒651-2271
Tel 078-991-1911