

機械器具66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
金属ノズル付ミニミキシングチップS


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

本品は、ペースト状の材料を練和するための攪拌翼及びミキサーハウジング、専用シリンジに取り付けるためのアダプター、並びに練和されたペーストの取り出し口の金属ノズルから成る。

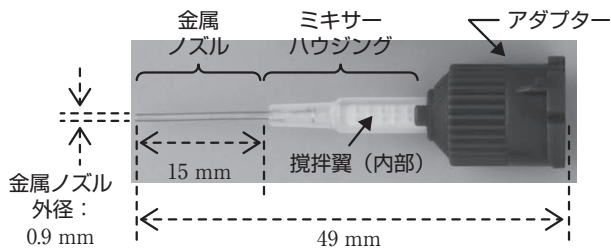

・材質

攪拌翼	ポリプロピレン樹脂
ミキサーハウジング	ポリプロピレン樹脂
アダプター	ポリプロピレン樹脂
金属ノズル	ステンレス鋼

2) 原理

専用シリンジから押し出された2種のペーストが、本品の内部の攪拌翼を通過することによって練和される。

【使用目的又は効果】

歯科材料を練和する器具

【使用目的又は効果に関連する使用上の注意】


使用する製品シリンジが本品の装着に適したものであることを確認の上、使用すること。

【使用方法等】

本品及び使用する製品シリンジに破損などの異常がないことを確認します。

●エステコア ハンドタイプ（別売）以外のペースト製品に本品を使用しないこと。

- 1) シリンジのキャップを取り外し、2種のペーストが均等に吐出されることを確認します。
- 2) 本品のアダプターの三角突起とシリンジ先端の切り欠き（下図参照）を合わせてセットし、ミキシングチップの先端側から見て時計回りに90°回転させ、確実に固定します。

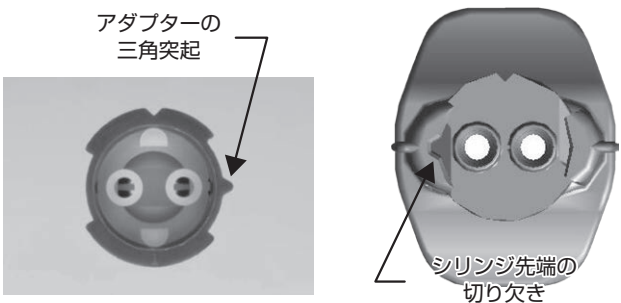

- 3) 必要に応じて、金属ノズルの中央部付近を任意の向きに曲げます。
 - 金属ノズルを曲げる際は、中央部付近を、指を添えてゆっくり曲げること。

○良い例



×悪い例



- ミキサーハウジングとの接合部付近で、強く曲げないこと。
 - 金属ノズルを135°以上に曲げないこと。
 - 金属ノズルを曲げた後、逆方向に曲げたり、曲げ伸ばしを繰り返さないこと。
- 4) ペーストを押し出すと、練和物が本品の先端より吐出されます。
 - ペーストの押し出し始めは押し出し感を確認しながら押し出し、ペーストの吐出を終えるまで無理な力をかけないこと。
 - 5) 使用後、本品を取り外す場合には、本品を反時計回りに90°回転させ、本品の三角突起とシリンジ先端の切り欠きを合わせて引き抜きます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ペーストを急激に押し出すと、ペーストの漏れ、ペースト容器の破損を引き起こすことがあるので、押し出しには注意すること。
- ・本品を使用する際は、使用するペースト製品の添付文書／使用説明書等の指示に従うこと。
- ・ディスペンシングガン等の押し出し器具を用いたペーストの練和に本品を使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本品の攪拌翼をハウジング内部から引き出さないこと。また、金属ノズルを引き抜かないこと。
 - ・本品の樹脂部分を曲げたり潰したりすると均一に練和されなくなったり、ジョイント部からペーストが漏れたりするので注意すること。
 - ・本品が破損していた場合は、使用しないこと。
 - ・使用後は、感染性の汚染が考えられる場合は医療廃棄物として、汚染のない場合は産業廃棄物として廃棄すること。
 - ・本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・本品は、歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。
- 2) その他の注意

本書の記載内容は、作成／改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、新しい知見により改訂することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光や高温多湿を避けて保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 株式会社トクヤマデンタル
住所 〒314-0255 茨城県神栖市砂山26
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1182

製造 国名 スイス
業者名 ブルツァーミックスパック社
Sulzer Mixpac AG

ご使用前に本書の
使用上の注意をよく
お読み下さい。