


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
ペリオメイト パウダー

** 【禁忌・禁止】

- 1) 適用対象 (患者)
 - ・ 以下のような患者には使用しないこと。
 - － 呼吸器疾患のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - － 病的に深い歯周ポケット (6 mm 以上)、及び粘膜病変のある患者。
[軟組織や唾液腺付近へ長時間 (5 秒程度以上) 噴射すると本品を含んだエアが入り、ごく稀に皮下気腫を生じるおそれ]
 - － 重篤な消化器官潰瘍のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - － 腎臓障害のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - － 心機能障害、肺機能障害のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - － 人工心臓弁、人工関節を装着し、抗凝固剤を服用している患者。[敗血症、菌血症のおそれ]
 - － 口腔内に疾患 (口内炎、口腔粘膜炎等) がある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - ・ 以下の状態にある患者には使用しないこと。
 - － 口腔内に損傷 (外傷、熱傷等) が認められる患者。[症状が悪化するおそれ]
 - － 口腔内に炎症、潰瘍、充血、出血、びらん、まひ感等が認められる患者。[症状が悪化するおそれ]
 - ・ 以下の患者に対する深い歯周ポケットへの使用はしないこと。
 - － 心内膜炎のある患者。[菌血症のおそれ]
 - － 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人、授乳中の婦人。[菌血症のおそれ]
 - － 伝染病の患者。[菌血症のおそれ]
 - － 免疫不全症 (好中球減少症、顆粒球減少症、無顆粒球症、糖尿病、血友病) の患者。[菌血症のおそれ]
 - － 放射線治療中、化学療法治療中、抗生物質投与中の患者。[菌血症のおそれ]
 - ・ 本品、又は本品に含まれる成分に対してアレルギー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

1) 形状

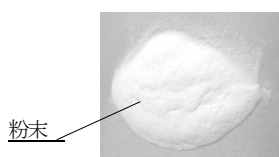

ボトル (160 g/ボトル)

2) 主な原材料

グリシン

3) 原理

本品を圧縮空気、水と共に吹き付けることによる表面研磨。

【使用目的又は効果】

粉末状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

** 【使用方法等】

詳細については、製造販売業者が指定する能動型機器接続歯面清掃用器具、又は歯科用多目的超音波治療器の取扱説明書を参照すること。

- ① 能動型機器接続歯面清掃用器具、又は歯科用多目的超音波治療器の使用方法に従って、本品を補充後、歯面の清掃及び研磨を行う。
- ② 使用後は、能動型機器接続歯面清掃用器具、又は歯科用多目的超音波治療器に残った本品を除去する。

** 【使用方法等に関する使用上の注意】

- ・ 製造販売業者が指定する能動型機器接続歯面清掃用器具、及び歯科用多目的超音波治療器以外に補充して使用しないこと。
- ・ 使用するエアは、清浄な乾燥したエアを使用すること。[エアに水分、油分が混じっていると本品が固まるおそれ]
- ・ 患者が本品を大量に飲み込まないよう、必ずバキューム、又は排唾管を併用すること。
- ・ 使用前に本品の包装が開封又は破損していないか確認すること。
- ・ 本品を補充する前に、本品のボトルをよく振ること。[本品が固まり、詰まりのおそれ]
- ・ 本品の補充はゆっくりと行い、本品の飛散に注意すること。
- ・ 本品の飛散を抑えるため、水をノズルから噴射させながら、使用すること。
- ・ 開封したまま長時間経過した本品は使用しないこと。必ず乾燥した新しい本品を使用し、使用後に余った本品は廃棄すること。

** 【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・ 使用中にアレルギー症状や口内炎の症状が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・ 本品を使用した処置により発疹、皮膚炎などの過敏症があらわれた場合や、気腫が発生した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・ 飛散した本品が患者の口腔以外の粘膜部分 (目、鼻等) に入らないように十分に注意すること。例えば、患者の顔をタオルのようなもの、又は防護用眼鏡等で保護すること。
- ・ 万一、目に本品が入った場合は、すぐに大量の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ・ 使用の際には、術者、アシスタントとも常時、保護眼鏡、防塵マスクを着用すること。また、噴射した本品をバキューム等で吸い取りながら使用すること。
- ・ 患者がコンタクトレンズを装着している場合は、保護眼鏡を着用させるか、コンタクトレンズを外してから治療すること。
- ・ 長時間の連続使用は避け、患者には休憩がいをさせること。
- ・ 患者の唇にワセリン等を塗り、口角の乾燥又はひび割れを防ぐこと。
- ・ 処置後、2～3 時間以内に飲食 (お茶、コーヒー、又は食べ物) をしてしまうと、歯の染色を引き起こしてしまう可能性があるため、飲食をしないよう患者に指導すること。

2) その他の注意

- ・ 結石及び歯石は本品にて除去できないため注意すること。
- ・ 使用後、使い残しの本品は決してボトルに戻さないこと。

** 【保管方法及び有効期間等】

1) 保管の条件

直射日光、汚染、湿気を避けて常温にて保管すること。

2) 使用期間 (使用期限)

本品の包装に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証 (当社データ) による]

例 :  XXXXY 使用期限 XXXX 年 YY 月末日を示す。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

 0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00 (土日・祝祭日を除く)

TEL : 0289-64-3380

FAX : 0289-62-5636

製造業者 : 3M シーフェルド工場

国名 : ドイツ

「能動型機器接続歯面清掃用器具」又は「歯科用多目的超音波治療器」の取扱説明書を必ずご参照ください。