

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

タバネル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
本品は、E. O. G 滅菌された再使用禁止製品である。
再滅菌・再使用をしないこと。
- 手術中に使用されるコード、チューブ以外の物には使用しないこと。
- チューブに使用する場合は、本品を使用することによりチューブが閉塞しないようにすること。

【形状・構造及び原理等】

- 外観図
(プレート付)

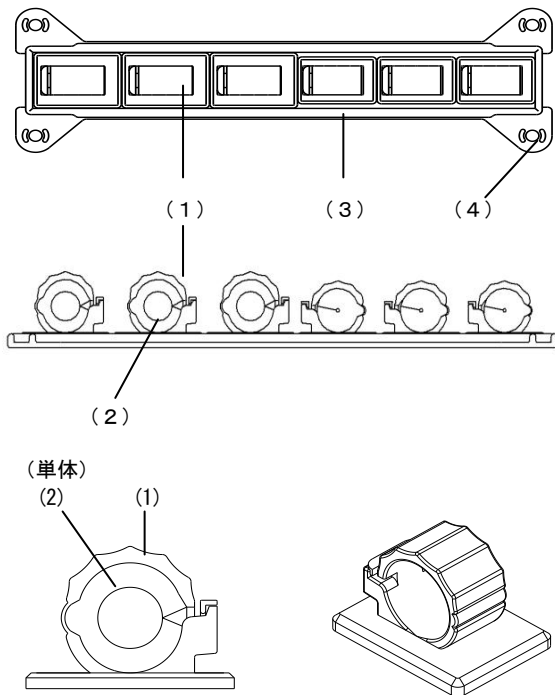

質量：プレート付き 約76g（フィックス33の場合）
クランプ単体 約9.5g

- 種類

型式名	クランプ数
フィックス33	大3個：小3個
フィックス42	大4個：小2個
フィックス33プラス	大3個：小3個：単体クランプ大3個

- 名称と組成 ■備考／本製品は生体非接触である

照番	各部の名称	原材料
(1)	クランプ	合成樹脂
(2)	スポンジ	合成樹脂
(3)	プレート	合成樹脂
(4)	プレート固定部	合成樹脂

- 各部の機能

照番	各部の名称	機能
(1)	クランプ	チューブ、コード等を束ねる
(2)	スポンジ	チューブ、コード等を保護する
(3)	プレート	個々のクランプを連結し手術台に固定する
(4)	プレート固定部	鉗子等で固定する場合の孔

【使用目的、効能又は効果】

本品は手術台に付属するアクセサリである。手術中に使用される機器等のコードやチューブを束ねて固定することにより、手術が円滑に進行できる。本品は滅菌済みであり開封後直ちに使用できる。

【品目仕様等】

- 接着強度
接着面に対して平行に荷重をかけたとき、3kgf 以下の力で台座（プレート）からクランプが脱落しないこと。
- 無菌性
無菌性保証基準 SAL10⁻⁶

【操作方法又は使用方法等】

- 本品を滅菌袋から取り出し、本品の外観に破損や汚れ、ひびなどの異常がないかを確認する。
- プレート上のクランプを開き、束ねて固定したいコードやチューブをスポンジに載せクランプを閉じる。
- 使用者の意図する場所に固定しても良いし、固定しなくても良い。
- プレートを固定する場合は、プレート固定部の孔にタオル鉗子等を掛けてドレープやL字フックに固定する。
- 「フィックス33プラス」を使用の場合は、単体クランプ（3個）を利用してプレート上のクランプから分流させたチューブ・コード類を系統的にまとめてクランプすることができる。
- 使用後はクランプを開きコードやチューブ類に異常がないことを確認し、医療廃棄物として適正に廃棄する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は医師または医師の指導のもとに使用すること。
- 本品は目的用途以外には使用しないこと。
- 他の医療機器と組み合わせて使用する際は、安全確認を行ってから使用すること。
- 包装開封後はすぐに使用すること。
- 必ず本品の滅菌袋に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- 滅菌袋の包装が破損、汚損している場合や製品に異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は単回使用製品である。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えた場合は使用しないこと。
- 患者の体位変更などにより本品の固定が外れないように注意すること。
- 手術中に使用されるコード、チューブ以外の物には使用しないこと。

その他の注意

使用済の本品を廃棄する場合は、周囲の環境を汚染しないように注意し、消毒などの十分な処置を講じた後、感染性廃棄物処理マニュアルに基づき適正に処理すること。(血液による感染防止)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**貯蔵・保管方法**

水濡れ、ほこり、高温、多湿、直射日光に当たる場所は避けること。

有効期間・使用の期限

包装箱に記載 (自己認証[当社データ]による)

【包装】

1本/1滅菌袋に収納し、10本/包装箱に収納

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション

(MERASENKO CORPORATION)

国名：フィリピン

お問合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011