

機械器具 38 医療用鉤  
一般医療機器 鉤 35105000

## メラ MICS用左房鉤

### 【禁忌・禁止】


\* 未滅菌品の再使用禁止[感染のおそれがある]

### 【形状・構造及び原理等】

組成

JISG4304 SUS420J2


形状

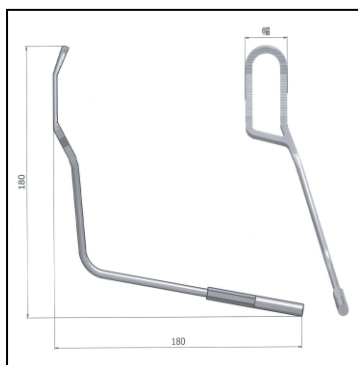

規格

鏡視下用 幅30mm


鏡視下用 幅35mm

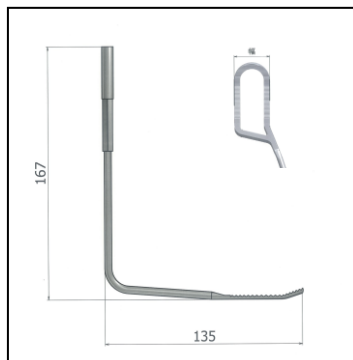

規格

直視下用 幅30mm

直視下用 幅35mm

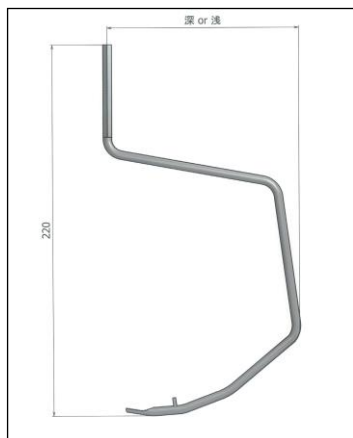

規格

直視下用AK型深型幅  
30mm

直視下用AK型浅型幅  
30mm

### 【使用目的又は効果】

創口、術部を覆う組織、筋肉などを広げるために用いる。

### 【使用上の注意】

\* 重要な基本的注意

\* 1. 電気手術器との接触には注意すること。[組織損傷、術者の感電、熱傷につながる可能性がある]

\* その他の注意

\* 1. 塩素系やヨウ素系の消毒剤が付着したときは直ちに水洗いをする。[腐食の原因となる]

\* 2. 長時間、器具に血液等を付着させたまま放置しないこと。長時間、生理食塩水に浸さないこと。[腐食の原因となる]

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

器具は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

\* 1. 洗浄、消毒

(1) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。[表面に擦過傷を生じ、腐食の原因になる]

\* (2) 強アルカリ性、強酸性の洗剤、消毒剤は使用しないこと。[腐食の原因となる]

(3) 洗剤はpH6～8の中性のものを使用すること。

\* (4) 洗浄、すすぎに使用する水は、出来るだけ脱塩あるいは蒸留したものを使用すること。

(5) 洗浄は超音波洗浄を行うこと。超音波洗浄装置メーカー指定の方法にて洗浄すること。

(6) 洗浄後は十分に乾燥させること。

(7) 洗浄、乾燥後は水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。

\* 2. 滅菌方法

(1) 滅菌はオートクレーブ装置にて行うこと。

オートクレーブ装置メーカー指定の方法にて滅菌すること。

\* (2) 滅菌時は、ラチェットを開いた状態で行うこと。

\* (3) 滅菌時は乾燥状態を確認すること。[滅菌不良となる可能性がある]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\* 製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011

文書管理番号 AO-3109-02

社内識別番号 0452012800

社内識別番号 0452012900

社内識別番号 0452013000

社内識別番号 0452013100

社内識別番号 0452013200

社内識別番号 0452013300