

器76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式加湿器 35113000

湿潤器 (加湿瓶)

TP-113

* 【警告】

【使用方法】

- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。
- #### 【併用医療機器】
- ・酸素吸入器に、確実に接続されている事を確認してください。
 - ・酸素マスクや酸素カニューラが、確実に接続されている事を確認してください。
 - ・酸素マスクや酸素カニューラからの酸素流出を確認し、患者に装着してください。

* 【禁忌・禁止】

- ・異なる機種のご構成を接続しないでください。
- ・有害な空気の中で使用しないでください。
- ・酸素中に油が混入する様な環境下で使用しないでください。
- ・煙草や裸火のそばで使用しないでください。

【推奨薬剤】

- ・消毒用アルコール
 - ・次亜塩素酸ナトリウム
- ※使用後は薬剤を洗い流してください。
※両性界面活性型外用殺菌消毒剤等の薬液は使用しないでください。

**、* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社
TEL: 049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)

* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造



* 【使用目的又は効果】

酸素吸入時の乾燥したガスに水蒸気を添加するために使用する。

* 【使用方法等】

- 1) 湿潤器用キャップを外してください。
- 2) 湿潤器用ボトルのウォーターライン (WATER LINE) まで、精製水を入れてください。
- 3) 湿潤器用ボトルに、湿潤器用キャップを接続してください。
- 4) 酸素吸入器 [併用医療機器] に、湿潤器 (加湿瓶) を接続してください。
- 5) 湿潤器 (加湿瓶) に、酸素マスク・酸素カニューラ [併用医療機器] を接続してください。

* 【使用上の注意】

湿潤器用ボトル中の精製水がウォーターラインを越えていないことを確認してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6年 (自己認証による)

* 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られるようにしてください。