

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 ガイド (37150000)

## テンプレート BiopSee 4.0


### 【警告】

本品は未滅菌品のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、超音波ガイド時の画像上のプロットと固定したテンプレートのニードルホールの位置とを対応させることにより、前立腺の正確な位置へと生検針を導くために用いる器具である。

フレームテンプレート、中央のミドルテンプレート、および背面のリアテンプレートで構成されている。

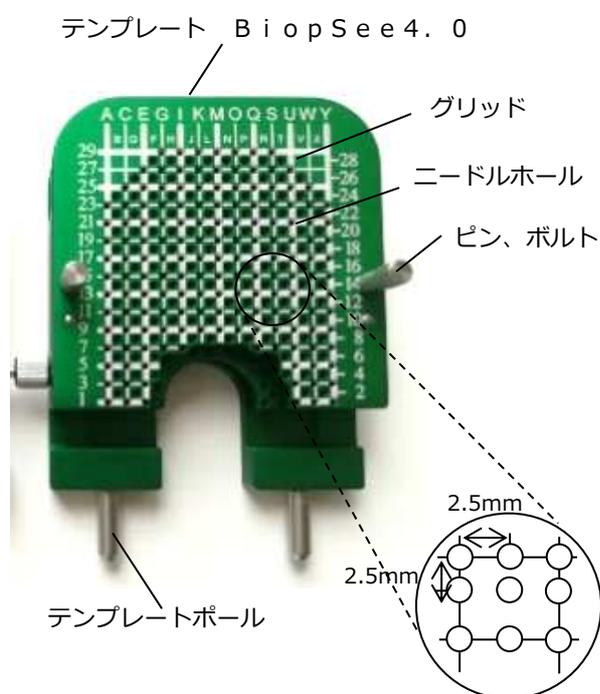

### 【使用目的又は効果】

本品は前立腺生検時に、生検針を適正な進路に導くために用いる器具である。使用する際は、機器に固定して用いる。

### 【使用方法等】

1. テンプレートポールを専用ステッパに装着する。
2. 専用ステッパのネジを回してテンプレートを固定する。
3. 超音波画像とテンプレートのプロットの位置とが対応していることを確認し、生検針を挿入する。

### 洗浄及び滅菌方法

使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。  
(指定方法に従って行うこと。)

なお、詳細な使用方法は、テンプレート BiopSee 4.0 に付属の取扱説明書を参照すること。

### 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 洗浄、消毒または滅菌については、使用方法や手順を必ずテンプレート BiopSee 4.0 に付属の取扱説明書で確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〈保管(輸送)条件〉

- (1) 周囲温度：-20～+50℃
- (2) 相対湿度：10～95%
- (3) 気圧：500～1060hPa

#### 〈保管方法〉

直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な状態で保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 〈製造販売業者〉

吉田電材工業株式会社

電話番号 048-955-2121 (三郷工場)

ホームページ <http://www.yoshida-denzai.co.jp>

#### 〈外国製造業者〉

Gesellschaft für Medizintechnik mbH (ドイツ)

取扱説明書を必ずご参照ください。