

241195/R5

* 2015年 3月 9日改訂(第5版)
** 2012年 9月 1日改訂(第4版)

この添付文書をよく読んでから使用すること。

製造販売届出番号 12B1X10004000002

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

滅菌綿棒 ソフトFS

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

本品はプラスチック軸の先端にナイロン繊維を接着した綿棒である。(滅菌済み)



【使用目的、効能又は効果】

本品は検査のための試料を採取する器具である。

【操作方法又は使用方法等】

個包装袋の開封口からフィルムをゆっくり剥がし、綿球部分を汚染しないように取り出し、検体を採取する。

【使用上の注意】

1. 開封後は速やかに使用すること。
2. 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。
3. 本品は滅菌済みであるので、個包装袋に破れや汚染の疑いがある場合には使用しないこと。
4. 本品に汚れ、破損、折れ、曲がりなどがあつた場合は使用しないこと。
5. 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして綿棒の軸を折らないよう注意すること。
6. 検体を取り扱うときは感染の危険性を考慮して使い捨て手袋を使用するなどじゅうぶん注意すること。
7. 本品を使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理すること。
8. 使用期限が切れたものは使用しないこと。
9. 使用目的以外に使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：2～30℃で凍結を避けて保存
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

使用期限：外箱に記載 [自己認証(当社データ)による]

【包装】

50本/箱

【問い合わせ先】

アリーア メディカル株式会社 お客様相談室

* 〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1
フリーダイヤル 0120-1874-86
受付時間 9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元：アリーア メディカル株式会社
〒270-2214 千葉県松戸市松飛台357
電話番号：047-311-5750

製造元：コパン フロック テクノロジーズ エス アール エル
(COPAN FLOCK TECHNOLOGIES s.r.l.) (イタリア)

製造販売元
Alere
アリーア メディカル 株式会社
千葉県松戸市松飛台357

販売元
富士製薬工業株式会社
富山県富山市水橋辻ケ堂1515番地
販売元
株式会社三和化学研究所
S K K 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

© 2015 Alere. All rights reserved.