

2016年 12月改訂(第6版)(新記載要領に基づく改訂)

2015年 3月改訂(第5版)

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

滅菌綿棒 ソフトFS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はプラスチック軸の先端にナイロン繊維を接着した綿棒である。(滅菌済み)



【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

個包装袋の開封口からフィルムをゆっくり剥がし、綿球部分を汚染しないように取り出し、検体を採取する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押したりして綿棒の軸を折らないよう注意すること。
2. 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。

＜その他の注意＞

1. 開封後は速やかに使用すること。
2. 本品を使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：2～30℃で凍結を避けて保存

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

使用期限：外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：アリーア メディカル株式会社

問い合わせ先：アリーア メディカル株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-1874-86
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製 造 元：コパン フロック テクノロジーズ エス アール エル
(COPAN FLOCK TECHNOLOGIES s.r.l.) (イタリア)

—— 販売元 ——

 **富士製薬工業株式会社**
富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地

 **株式会社 三和化学研究所**
販売元
名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

—— 製造販売元 ——

 **Alere**
製造販売元
アリーア メディカル 株式会社
千葉県松戸市松飛台357