



1156081803

製造販売届出番号 12B1X10004000012



再使用禁止

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000**2020年 1月改訂 (第3版)
*2016年 12月改訂 (第2版)
(新記載要領に基づく改訂)

滅菌綿棒 F S (咽頭用)


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はプラスチック軸の片側先端にナイロン繊維を接着した綿棒である。(滅菌済み)

寸法・全長 151mm ± 4mm

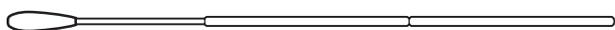

ブレイクポイント…輸送の際に折って使用できます。

【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

1. 個包装袋の開封口をつかみ、綿球部分に触れないようゆっくりはがすように開け、本品の軸部分をつまんで取り出す。
2. 綿球部分で検体を採取する。検体採取は適切な方法、操作で行うこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして綿棒の軸を折り曲げたりしないこと。[綿棒が破損しやすくなるため]
- 2) 検体を採取する前に綿棒の軸部分を折り曲げる、湾曲させるなど変形させて使用しないこと。

<その他の注意>

- 1) 開封後は速やかに使用すること。
- 2) 本品の使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：2～30℃ 凍結しないこと

有効期間：3年 [自己認証(当社データによる)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売元：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

** 問い合わせ先：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-1874-86
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)** 製造元：コパン イタリア エッセピーエー
(Copan Italia S.p.A.) (イタリア)

— 販売元 —


 販売元
株式会社 三和化学研究所
名古屋市中区東外堀町35番地 〒461-8631


 富士製薬工業株式会社
富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地

— 製造販売元 —

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
千葉県松戸市松飛台357