

機械器具(21) 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

## プロセス

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】\*

<使用方法>

本品は、ディスポーザブル製品ですので再使用できません。

<併用医療機器> 「相互作用の項参照」

MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。


### 【使用上の注意】\*

<重要な基本的注意>


- 皮膚疾患や創傷のある部位には使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあります。このような場合は、使用を中止して下さい。
- 開封後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止に努め、早めに使用して下さい。

### 【形状・構造及び原理等】

電極形状: PSC-SC43, PSC-SC43/3, PSC-WC43

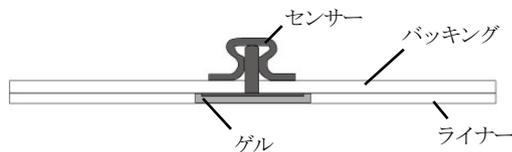

電極形状: PSC-FG32 (全面ゲルタイプ)

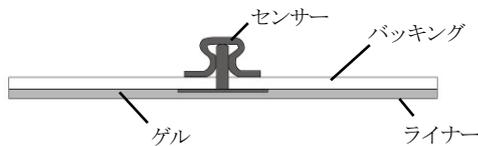

型式	寸法[mm]	バックリング	ゲル
PSC-SC43	43×45	クロスバックリング	ソリッドゲル
PSC-SC43/3	43×45	クロスバックリング	ソリッドゲル
PSC-WC43	43×45	クロスバックリング	ウェットゲル
PSC-FG32	φ32	クロスバックリング	ハイドロゲル

センサー: 銀/塩化銀蒸着処理カーボン

接着剤: アクリル系接着剤

ライナー: ポリエチレンテレフタレート

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)>

#### 1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
核磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	使用禁止	誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負うことがある。

### 【保管方法及び有効期間等】\*

保管方法:

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度範囲: 0℃~40℃

使用期限:

未開封時の使用期限は電極袋に記載されています。

製造日より24ヶ月以内[自己認証(当社データ)により設定]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者: 株式会社センステック

TEL 04-7128-6023

製造業者・国名:

BIO PROTECH・Korea

バイオプロテック・大韓民国

### 【使用目的又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する導体です。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計(ECG)です。本品は単回使用です。

### 【使用方法等】

- 装着部位をアルコール綿などで清拭し、よく乾かして下さい。
- 電極を袋から取り出し、ライナーから電極を剥がして下さい。
- 電極を皮膚面にあてしっかり固定して下さい。
- 電極のプレススタッドにリード線を固定して下さい。