

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード 16184000


プロフィールカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

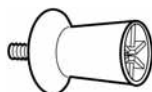

プロフィールカップ

名称	面の形状	組成
101 / リブ		シリコーン樹脂
103 / シックスウェブ		シリコーン樹脂
104 / スクエアリーブ & ウェブ		シリコーン樹脂
105 / リブ&ウェブ		シリコーン樹脂
106 / ピドリブ		シリコーン樹脂

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を適用する。

【操作方法又は使用方法等】

- ① 研磨部位に応じてプロフィールカップを選択する。
- ② プロフィールカップをスクリュータイプのプロフィールコントラハンドピースに取り付ける。
- ③ プロフィールカップに十分な研磨用ペーストを付ける。
- ④ プロフィールカップを歯全体に軽く押し付けて研磨する。

※回転数は 800～1,200r.p.m.で使用する。

【使用上の注意】

- ① 再使用禁止。
- ② 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ③ 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ④ 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせる恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ⑤ 本品は、シャンク（スクリュー）部を確実に最後まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
- ⑥ 使用前に口腔外で予備回転を行い、振れないことを確認すること。
- ⑦ 使用に際しては、プロフィールカップを歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィールペーストが飛び散ることがある。
- ⑧ 使用に際しては、無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。
- ⑨ 本品はスクリュー式なので、モーターを逆（左）回転させると外れてしまう。使用に際しては、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【包装】

12 個入り、144 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨネタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：ALLPRO INC.（国名：アメリカ合衆国）