

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード 16184000

プロフィーポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【包装】

12 個入り

【形状、構造及び原理等】



プロフィーポイント

名称	面の形状	組成
108S/ソフト/グリーン		合成ゴム
108H/ハード/イエロー		合成ゴム

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ALLPRO INC.（国名：アメリカ合衆国）

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するため
に用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り
付けて回転させて研磨材を適用する。

【操作方法又は使用方法等】

研磨部位に応じてプロフィーポイントを選択する。
プロフィーポイントをスクリュータイプのプロフィー
コントラハンドピースに取り付ける。
プロフィーポイントに十分な研磨用ペーストを付け
る。
プロフィーポイントを歯全体に軽く押し付けて研磨す
る。

回転数は 800～1,200r.p.m. で使用すること。

【使用上の注意】

再使用禁止。

本品は、記載の使用目的のみに使用すること。

本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。

使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせる恐
れがあるので、使用回転数を厳守すること。

本品は、シャンク（スクリュー）部を確実に最後まで挿
入し、半チャックになっていないことを確認すること。
使用前に口腔外で予備回転を行い、振れがないことを
確認すること。

使用に際しては、プロフィーポイントを歯面にあてた
後、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィー
ペーストが飛び散ることがある。

使用に際しては、無理な力を加えないこと。無理な力
を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける
恐れがある。

本品はスクリュー式なので、モーターを逆（左）回転さ
せると外れてしまう。使用に際しては、必ず正（右）回
転で使用し、逆（左）回転はしないこと。