

歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDNコード：70832000

コー・トレープラスチック ファストセット

【禁忌・禁止】

本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある場合には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は下記の成分により構成される。

構成品	性状	成分
パウダー	白色粉末	ポリメチルメタクリレート、ステアリン酸亜鉛 他
リキッド	無色透明液体	メチルメタクリレート、変性アルコール 他
コー・セップ (分離剤)	透明液体	精製水、変性アルコール、グリセリン他

付属品：計量カップ、計量スプーン

【使用目的、効能又は効果】

個人トレー及びベースプレート等に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- 個人トレーの作製
 - 石こう模型を水中に10分間浸漬した後、コー・セップ(分離剤)を模型表面に薄く一層に塗布する。柔らかい鉛筆を用いてトレーの輪郭を描く。
 - ベースプレートワックスシートを厚さ1~2mmとなるように模型にのせ、鉛筆でマークした輪郭に沿ってワックスをトリミングする。
 - 発熱が開始した時に溶けたワックスが模型に付かないように、ワックスシートの上にポリエチレンシートをかぶせる。
 - トレー1個に対して、専用の計量スプーンすり切り1杯のパウダー(17g)とリキッド8mLを混合する。
 - スパチュラを用いて均一になるまで30~40秒間練和する。
 - 粘着性が低下してきた時点で、練和物を板状に伸ばし、模型に張り付ける。
 - 本品がまだ柔らかい間に、余分な部分を取り除く。
 - 必要に応じて余剰な材料を用いてハンドルを作る。ハンドル及びトレーの接着させる部分に少量のリキッドを塗布して接着させる。
 - 本品が発熱し始めたら、石こう模型からトレーをゆっくりと持ち上げ、ワックスペーパーとポリエチレンシートを取り除く。
 - トレーを模型上に戻し、完全に硬化するまで放置する。硬化終了時まで要する時間は約10分間である。
 - トレーを冷却した後、必要に応じてトリミング及び研磨を行い仕上げる。
- ベースプレートの安定材としての使用方法
 - 模型表面にコー・セップを塗布する。
 - スパチュラを用いて、専用の計量スプーン1/4杯のパウダー(4g)とリキッド3mLを混合する。
 - シロップのような粘稠度になるまで練和した後、トリミングされたベースプレートの内部に流し込む。

- ④ベースプレートを模型の上に空気が入らないように注意深くかぶせて圧接する。
- ⑤2分後にトリミングを行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
 - ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
 - ③開封後はできるだけ速やかに使用すること。
 - ④他の製品と混用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - ①本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
 - ②本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ③リキッドは可燃性なので火気から遠ざけること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (保管方法)
- 本品は、容器又は外装に記載されている条件で保管すること。
 - 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (使用期限)
- 容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[当社データ]による。)

【包装】

コー・トレープラスチック ファストセット：
パウダー(454g)、リキッド(177mL)、付属品

コー・トレープラスチック ファストセット 3ポンドお徳用セット：
パウダー(1,361g)、リキッド(473mL)、付属品

補充用単品：
パウダー単品； 454g、1,361g
リキッド単品； 177mL、473mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 株式会社 ヨシダ
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ジーシーアメリカ
GC America Inc. (国名：アメリカ合衆国)