

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN: 41876000

ブキャナン ハンドプラガー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるので、
金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 型 番：
ハンドプラガー I、ハンドプラガー II
2. 原材料：
作業部：ステンレス鋼 (AISI440A)、ニッケルチタン合金
ハンドル：アルミニウム (6061-T6)

【使用目的、効能又は効果】

充填物を軸方向に充填する。

【品目仕様等】

先端部の直径 サイズ I 0.43mm と 0.9mm
 サイズ II 0.78mm と 1.5mm

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ① 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
 - ② 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
 - ③ 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
 - ④ 先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
 - ⑤ 口腔内での破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - ⑥ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
 - ⑦ 洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ⑧ 次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤等は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
 - ⑨ 薬液消毒を行なう時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ⑩ 消毒を行う時は、グルタラル製剤は使用しないこと。
 - ⑪ 濯ぎを十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、腐食や変色する場合があるので注意すること。
 - ⑫ 本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
 - ⑬ 長期の使用により、金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので適時交換すること。
 - ⑭ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ① 保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ② 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③ 本品は、歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ② 汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ③ 超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ④ 洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。
- ⑤ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ⑥ 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検すること。
- ⑦ 点検後、セット、包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のためのセット、包装に当たっては、確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑧ 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **オーモ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：オームコーポレーション 社 *
Ormco Corporation
（国名：アメリカ合衆国）