

## リトラクター

### 【禁忌・禁止】\*

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるため、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 型番

- カー# 1 45度リトラクター
- カー# 2 90度リトラクター

#### 2. 原材料

ステンレス鋼

### 【使用目的・効能又は効果】

手術時に可視性及び到達性を向上させるため、軟組織を移動し、保護するために用いる。

### 【品目仕様等】

曲がり角度: 45度、90度

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- ④口腔内での破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ⑤使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑥次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。
- ⑦洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑧薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
- ⑨消毒を行う時はグルタラル製剤は使用しないこと。
- ⑩濯ぎを十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、変色や腐食する場合がありますので注意すること。
- ⑪本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次加工(改造)することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
- ⑫長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑬損傷、変形等のあるものは使用しないこと。

#### 2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中

止し、専門医の診断を受けさせること。

### 【貯蔵方法及び使用期間等】

(保管方法)

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

(洗浄、滅菌方法)

- ①使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ②汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- ③超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ④洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。
- ⑤金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。
- ⑥洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ⑦点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌バッグ詰め等に当たっては確実に滅菌できるように配慮すること。

### 【包装】

単品: 1本入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**  
住所: 〒110-8507  
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電話番号: 03-3845-2931

FAX番号: 03-3841-8204

製造元: オームコーポレーション社 \*  
Ormco Corporation  
(国名: アメリカ合衆国)