

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル JMDN：12235000

ミラー/スカルペルハンドル

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるの
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

1. 外観写真



2. 型番：CM-H

3. 原材料：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

替え刃メスを保持する。

【品目仕様等】

サイブロンエンド社製メス刃の取り付けが可能。

【操作方法又は使用方法等】

メス刃をハンドル先端に取り付け、ハンドルを握って固
定する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- ④使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等
が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑤洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑥次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザ
ルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロル
ヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭
用洗剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しな
いこと。
- ⑦薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用
上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素
材に影響を及ぼすことがある。
- ⑧消毒を行う時は、グルタール製剤は使用しないこと。
- ⑨濯ぎを十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、変色や
腐食する場合があるので注意すること。
- ⑩本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改
造）することは、折損の原因となるので絶対に行わな
いこと。
- ⑪長期の使用により金属疲労等の劣化が生じるので、適
時交換すること。
- ⑫損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるも
のは使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後

乾燥すること。

- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に
保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納
しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保
管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物
を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ②汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適した
ものを選択し、適正な濃度で使用するすること。
- ③超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して
損傷することがないように注意すること。また、汚れ
が落ち易いようにバスケットなどに収納すること。
- ④洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。
- ⑤洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ⑥使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常が
ないか点検すること。
- ⑦点検後、セット、包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。
滅菌のためのセット、包装に当たっては、確実に滅菌
できるように配慮すること。
- ⑧金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が
損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこ
と。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨナガ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：オームコーポレーション 社 *
Ormco Corporation
（国名：アメリカ合衆国）