

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル JMDN: 12235000

ミラー/スカルペルハンドル

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるの
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 外観



2. 型番: CM-H

3. 原材料: ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

替え刃メスを保持する。

【品目仕様等】

サイブロンエンド社製メス刃の取り付けが可能。

【操作方法又は使用方法等】**

ハンドル先端のチャック部分を回してチャックを緩
め、メス刃を取り付ける。
ハンドルを握ってメス刃を回しチャックをしっかり
締め、メス刃を固定する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等
が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザ
ルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロル
ヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭
用洗剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しな
いこと。
薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用
上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素
材に影響を及ぼすことがある。
消毒を行う時は、グルタラール製剤は使用しないこと。
濯ぎを十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、変色や
腐食する場合があるので注意すること。
本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改
造）することは、折損の原因となるので絶対に行わな
いこと。
長期の使用により金属疲労等の劣化が生じるので、適
時交換すること。
損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるも
のは使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後
乾燥すること。

「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に
保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納
しないこと。

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保
管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物
を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。

汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適した
ものを選択し、適正な濃度で使用する。

超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して
損傷することがないように注意すること。また、汚れ
が落ち易いようにバスケットなどに収納すること。

洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。

洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常が
ないか点検すること。

点検後、セット、包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。
滅菌のためのセット、包装に当たっては、確実に滅菌
できるように配慮すること。

金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が
損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこ
と。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:  株式会社 **ヨネタ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号: 03-3845-2931

F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: オームコーポレーション 社 *
Ormco Corporation
(国名: アメリカ合衆国)