

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル JMDN:12235000

ミラー/スカルペルハンドル

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性がある
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・

1. 外観



2. 型番: CM-H
3. 原材料: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

替え刃メスを保持する。

【使用方法等】*

- ①ハンドル先端のチャック部分を回してチャックを緩め、メス刃を取り付ける。
- ②ハンドルを握ってメス刃を回しチャックをしっかり
と締め、メス刃を固定する。

【使用上の注意】**

1. 使用注意
- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
 - ②使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等
を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒する
こと。 **
 - ③洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ④次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザ
ルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロル
ヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭
用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用し
ないこと。
 - ⑤薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用
上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素
材に影響を及ぼすことがある。
 - ⑥消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使
用すること。 **
 - ⑦すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色す
ることがあるので注意すること。 **
 - ⑧長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じる
ので、適時交換すること。

【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- ①「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に
保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収
納しないこと。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保
管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

- ①汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適した
ものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して
損傷することがないように注意すること。また、汚
れが落ち易いようにバスケットなどに収納するこ
と。
- ③洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。
- ④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。 **
- ⑤使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常が
ないことを点検すること。
- ⑥点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌
パック詰め等にあたっては、確実に滅菌できるよう
に配慮すること。 **
- ⑦金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面に
傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこ
と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨネタ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部
電 話 番 号: 03-3845-2931
F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: オームコーポレーション社
Ormco Corporation
(国名: アメリカ合衆国)