

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 JMDN:70680000

マイクロコンデンサー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるので、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 型番：

マイクロコンデンサー P-1 両頭コンデンサー
マイクロコンデンサー P-1 L 両頭コンデンサー
マイクロコンデンサー ファインスタインプラガー
マイクロコンデンサー ファインスタインプラガー大
マイクロコンデンサー ブキャナンコンデンサー右
マイクロコンデンサー ブキャナンコンデンサー左
マイクロコンデンサー ブキャナンコンデンサー 90 度

2. 原材料：

作業部 ステンレス鋼（440A）
ハンドル ステンレス鋼（304）

【使用目的、効能又は効果】

各種成形充填材を窩洞内に輸送、圧接充填をする器具。

【品目仕様等】

外観：使用上有害な傷、錆、変形がないこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- ④先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
- ⑤口腔内での破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ⑥使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑦洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑧次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤等は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
- ⑨薬液消毒を行なう時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ⑩消毒を行う時は、グルタラル製剤は使用しないこと。
- ⑪濯ぎを十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、腐食や変色する場合があるので注意すること。
- ⑫本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
- ⑬長期の使用により、金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので適時交換すること。

- ⑭損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ②汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ③超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ④洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。
- ⑤洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ⑥使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検すること。
- ⑦点検後、セット、包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のためのセット、包装に当たっては、確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑧金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。

【包装】

1 本入り

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：オームコーポレーション 社 *
Ormco Corporation
（国名：アメリカ合衆国）