

機械器具 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 JMDN:35812000

カーエクスプローラー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるの
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。*

【形状・構造及び原理等】

1. 型番
D G-16 エクスプローラー
カーエクスプローラー
2. 原材料
ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

歯科診療で触診等に用いる。

【品目仕様等】

傷、サビ、変形が無いこと

【操作方法又は使用方法等】

歯の咬合面や歯周の深さを探る。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
 - ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
 - ③使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
 - ④先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
 - ⑤破損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - ⑥使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
 - ⑦洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ⑧次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。
 - ⑨薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ⑩消毒を行う時はグルタール製剤は使用しないこと。
 - ⑪濯ぎを十分に行わないと、高圧蒸気滅菌により腐食や変色する場合があるので注意すること。
 - ⑫本品を、曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
 - ⑬長期の使用により、金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
 - ⑭損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ②汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ③超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ④洗浄剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。
- ⑤洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ⑥使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検すること。
- ⑦点検後、高圧蒸気滅菌をすること。
滅菌のための滅菌バッグ詰め等に当たっては確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑧金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：オームコーポレーション 社 *
Ormco Corporation
（国名：アメリカ合衆国）