

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

メガマイクロ

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

メガマイクロ φ3
メガマイクロ φ5
メガマイクロ 3×6
メガマイクロ用ホルダー

2. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ① 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ② 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③ 次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
- ④ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑤ 洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑥ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。特に長時間の浸漬は避けること。
- ⑦ 消毒を行うときは、グルタール製剤を使用しないこと。
- ⑧ 洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で鏡面曇りや金属腐食を起こすことがある。
- ⑨ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温での乾燥により、鏡面曇りや器質が変質または変色することがある。
- ⑩ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。EOG ガス滅菌で鏡面の曇りを起こすことがある。
- ⑪ 腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

⑫ 超音波洗浄器で洗浄すると、鏡面が剥離するので使用しないこと。

⑬ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いをしないこと。特に鏡面はガラス素材なので、強い力で圧迫すると破損する恐れがある。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ① 保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ② 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守点検に関する事項】

使用前・使用後には以下の点検を行うこと：

- ① 鏡面のキズ・ヒビ、破損等がないこと。
 - ② 歯鏡全体にキズや腐食がないこと。
 - ③ 鏡枠の中で鏡面が動かないこと。
 - ④ 接合部に錆びや剥離等がないこと。
- 上記の様な異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【包装】

メガマイクロ φ3	1 個入り
メガマイクロ φ5	1 個入り
メガマイクロ 3×6	1 個入り
メガマイクロ用ホルダー	1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：エー・ハーネンクラット
E. HAHNENKRATT GmbH（国名：ドイツ）