

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDNコード 70891000

ラボパテ

【禁忌・禁止】

本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、原材料

構成品	性状	成分
ベース材	淡赤色のパテ状	ポリシロキサン、二酸化ケイ素 他
促進材	青色のペースト状	ケイ酸アルキル、ジアルキルスズジカルボキシレート 他

付属品：計量スプーン

【使用目的、効能又は効果】

複模型の作製に用いるシリコン印象材。

【品目仕様等】

(室温 23℃、相対湿度 50℃の場合)

練和時間 : 30～45秒



作業時間 : 約90秒

硬化時間 : 5～7分

ショアA硬さ : 63～70

【操作方法又は使用方法等】

- ① 付属の計量スプーンでベース材を計量する。
- ② ベース材を手のひらに伸ばし、真ん中に計量スプーンの縁を押し付け円形の印を付ける。(計量スプーン一杯のベース材に対し、印は1個)
- ③ 円形の直径と同じ長さの促進材を注出する。
チューブのふたは使用後すぐに閉めること。

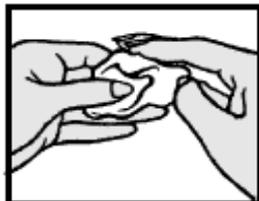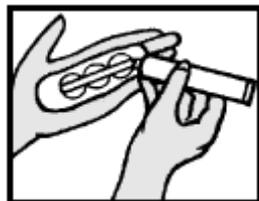

- ④ 均一な色になるまで30-45秒間練和する。
- ⑤ 室温では5-7分で硬化する。高温又は促進材の量が多めの場合には硬化時間は早まり、低温又は促進剤の量が少なめの場合には硬化時間は遅くなる。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ① 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ② 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③ 口腔内で使用しないこと。
- ④ 他の製品と混用しないこと。
- ⑤ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
- ② 本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

- 本品は、25℃以下の常温で乾燥した暗所に保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(使用期限)

本品の使用有効期間は下記のとおり。

ベース材：製造日から5年

促進材：製造日から3年

容器に記載されている使用期限までに使用すること。

(使用期限は自己認証[当社データ]による。)

【包装】

セット：ラボパテベース材 900mL、ラボパテ促進材 40mL
付属品；計量スプーン

単品：ラボパテ促進材 40mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨナガ**

住所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電話番号：03-3845-2931

FAX番号：03-3841-8204

製造元：コルテーン／ウェルデント社

Coltene/Whaledent AG

(国名：スイス)