

コルテン スパチュラ

【形状・構造及び原理等】*

1. 外観



2. 寸法

全長：234mm

幅：30mm

3. 原材料

ステンレス鋼（把持部は木製）

【使用目的、効能又は効果】

印象材を練和するために用いる器具。

【品目仕様等】*

形態は均整であり、変形がなく傷、その他使用上有害な欠点がなく仕上げは滑らかであること。

【操作方法又は使用方法等】

練和紙等に分取した印象材を練和する。

【使用上の注意】*

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ③次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ④破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ⑤長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）*

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。

【保守・点検に係る事項】*

（洗浄方法）

- ①洗浄のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②洗浄剤の残留がないように十分すすぎをすること。
- ③超音波洗浄器で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また汚れが落ち

やすいようにバスケットなどに収納すること

④洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

⑤清掃、洗浄に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用すると器具の表面を損傷させるので注意すること。

（点検）

①使用前に曲がり、変形等の有無を確認すること。

【包装】

単品：1本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元： コルテン／ウェルデント社

Coltene/Whaledent AG

（国名：スイス）