

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー JMDN: 16670000

ブラッセラー ダイヤモンドバー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

801-314-014 (Y440)
801-314-016
877-314-010
878-314-012

2. 原材料

軸 部: ステンレス鋼
作業部: ダイヤモンド砥粒

【使用目的、効能又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたステンレス製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯や歯科補綴物等を研削するために用いる回転式の研削器具。

【操作方法又は使用方法等】

1. 操作方法

タービンに装着して使用する。
外箱に記載している回転数以下で使用する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ①記載されている回転数以下で使用する。
- ②ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ③あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- ④頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑤歯髄為害防止のため、十分な量（少なくとも 50ml/min）の注水下で使用する。 *

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- ④目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ⑤次の回転数を超えて使用しないこと。 *
801-314-014、801-314-016: 300,000r.p.m./min
877-314-010、878-314-012: 160,000r.p.m./min
- ⑥破折、曲がり等の原因になるので、2 N を超える負荷を掛けないこと。 *
- ⑦使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸すこと。

- ⑧長期の使用により、金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので適時交換すること。
- ⑨損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により、感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ①水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

（洗浄方法）

- ①本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄すること。
- ②本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
- ③グルタール製剤、塩素系消毒剤は使用しないこと。
- ④超音波洗浄時間は 30 分程度行うこと。
- ⑤洗浄後は洗浄液の残留がないように十分にすすぐこと。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨する。

（滅菌方法）

- ①洗浄後は直ちに乾燥させること。
- ②使用（滅菌）前に、汚れ、傷、損傷等の異常がないかを点検すること。
- ③点検後、高圧蒸気滅菌を行うこと。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号: 03-3845-2931
F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: Gebr. Brasseler GmbH&Co.KG
(国名: ドイツ)