

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー JMDN: 16668000

ブラッセラー カーバイトバー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるため、
金属アレルギーの患者には使用しないこと。 **

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

H33L.104.021 (US703L)
H33.104.009 (US699)
23L.204.010 (US170L)
23L.204.012 (US171L)
H31R.314.010 (US1557) *

2. 原材料

軸 部: ステンレス鋼
作業部: タングステンカーバイド

【使用目的、効能又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科用ハンド
ピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用
いる回転式の研削器具。

【操作方法又は使用方法等】

1. 操作方法

歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ① 外箱に記載されている回転数以下で使用する。
- ② ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャ
ンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを
確認すること。
- ③ あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないこと
を確認すること。
- ④ 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲が
ったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で
の使用は避けること。
- ⑤ 歯髄為害防止のため、十分な量（少なくとも 50ml/min）
の注水下で使用する。 **

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ① 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ② 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③ 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- ④ 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ⑤ 破折、曲がり等の原因になるので、2 Nを超える負荷を
掛けないこと。 **
- ⑥ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等が
乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸すこと。
- ⑦ 長期の使用により、金属疲労や磨耗等の劣化が生じるの
で適時交換すること。
- ⑧ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるもの

は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により、感作又はアレルギー反応が表れる可
能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止
し、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ① 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物
理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 過酸化水素と接触させないこと。 **
- ③ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す
ること。

【保守・点検に係る事項】

（洗浄方法）

- ① 本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れ、超
音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を
入れて、超音波洗浄すること。 **
- ② 洗浄液の量は、本品がすべて浸かるように十分な量とす
ること。 **
- ③ グルタラル製剤、塩素系消毒剤は使用しないこと。
- ④ 超音波洗浄時間は 30 分程度行うこと。
- ⑤ 洗浄後は洗浄液の残留がないように十分に濯ぐこと。仕
上げ濯ぎには、精製水を用いることを推奨する。

（滅菌方法）

- ① 洗浄後は直ちに乾燥させること。
- ② 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、損傷等の異常がないかを
点検すること。
- ③ 点検後、高圧蒸気滅菌を行うこと。

【包装】

H33L.104.021 (US703L)	1 本入り
H33.104.009 (US699)	1 本入り
23L.204.010 (US170L)	5 本入り
23L.204.012 (US171L)	5 本入り
H31R.314.010 (US1557)	5 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号: 03-3845-2931
F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: ブラッセラー社
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
(国名: ドイツ)