

器具器械 58 整形用器具器械
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード 70757000

コエックス スキャンボディ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、スキャンボディと付属の固定用スクリューから構成される。

1) スキャンボディ（本体）

タイプ名	外観
Submerged Hex Type	
Hex Type	
Non-Hex Type	
Square Type	
Octa Type	
External Octa Type	
External Hex Type	
External Non-Hex Type	
Torx Type	
Tri Type	
External Torx Type	
Profile Type	

2) 固定用スクリュー



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

本品は、作業模型等に取り付けられたインプラントアナログに装着して補綴物の設計及び作製するために使用するスキャンニング用の器材である。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料。

【使用方法等】

（使用方法）

- ① 作業模型等に取り付けられたインプラントアナログの種類に対応する形状を選択し、インプラントアナログに挿入する。
- ② 専用のスクリューを用いて固定する。
- ③ 歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを使用して、本品が装着された作業模型をスキャンニングする。

（使用方法に関連する使用上の注意）

本品を他のパーツと連結させるときには、専用器具を使用すること。

【使用上の注意】

（使用注意）

- ① 形状の異常、変形、破損、汚れ、異物の付着等がある製品を使用すると、正確な情報が取得できない可能性があるため、使用前にこれらの異常がないことを確認すること。
- ② 本品に過度の力や衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、高温、多湿、直射日光、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

F A X 番号：03-3845-2926

製 造 元： ドゥオンアイディ社

DOOWONID Co., Ltd.（国名：韓国）