

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (16779000)
SW ペイシエントホース

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品はディスポーザブル製品です。[感染防止のため]
2. 再使用禁止。[感染防止のため]

***【形状・構造及び原理等】**

1. 構成

本品は吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブであり、チューブ及びアダプター、ペイシエントホース差しにより構成される。

2. 形式


- ① 1.8m 未滅菌
- ② 1.8m 未滅菌、ホース差し付き
- ③ 3 m 未滅菌、ホース差し付き
- ④ 3 m 滅菌済み
- ⑤ 50 m 未滅菌(内径/外径:6.35mm/9.8mm)
- ⑥ 50 m 未滅菌(内径/外径:7.0mm/11.0mm)

**** 3. 寸法**

単位 (mm)

	チューブサイズ			アダプターサイズ	
	内径	外径	全長	長さ	接続口内径
①	6.35	9.8	1,800	48.5	8.9
	未滅菌				
	チューブサイズ: 6.35, 9.8, 1,800; アダプターサイズ: 48.5, 8.9				
②	6.35	9.8	1,800	48.5	8.9
	未滅菌、ペイシエントホース差し付き				
	チューブサイズ: 6.35, 9.8, 1,800; アダプターサイズ: 48.5, 8.9				
③	6.35	9.8	3,000	48.5	8.9
	未滅菌、ペイシエントホース差し付き				
	チューブサイズ: 6.35, 9.8, 3,000; アダプターサイズ: 48.5, 8.9				
④	6.35	9.8	3,000	48.5	8.9
	滅菌済み				
	チューブサイズ: 6.35, 9.8, 3,000; アダプターサイズ: 48.5, 8.9				
⑤	6.35	9.8	50,000	-	-
	未滅菌、アダプターなし、ペイシエントホース差しなし				
	チューブサイズ: 6.35, 9.8, 50,000; アダプターサイズ: -				
⑥	7.0	11.0	50,000	-	-
	未滅菌、アダプターなし、ペイシエントホース差しなし				
	チューブサイズ: 7.0, 11.0, 50,000; アダプターサイズ: -				

4. 外観図及び各部の名称

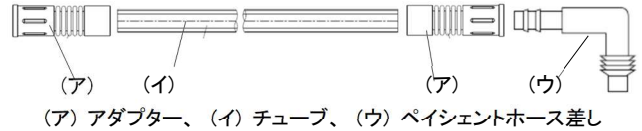

【使用目的又は効果】

浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブをいう。

【使用方法等】

1. 吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口の径を確認する。
2. パッケージを開封し、本品を取り出す。
3. 吸引器、回収容器、吸引嘴管等に本品を確実に差し込む。
4. 使用後は速やかに廃棄を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。[接合部が外れるおそれがあるため]。
- 2) 本品を高圧蒸気滅菌しないこと。

2. その他の注意

- 1) 使用中は適宜接続状態等を確認し、適切な処置を行うこと[接続部の漏れ、ゆるみ、外れ、つまりのおそれがあるため]
- 2) 使用前に本品に破損等の異常がないか確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 水濡れに注意すること。
- 2) 高温多湿(相対湿度 85%を超えないこと)、直射日光を避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時も含む)などの安定状態に注意すること。
- 4) 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。

2. 使用期限

製造日から3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社小池メディカル
電話 : 03-5662-6605(代)
製造業者 : Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.
(中華人民共和国)