

機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード 35148000

「スリットランプ SL-D2」
「スリットランプ SL-D4」
「スリットランプ SL-D7」
「スリットランプ SL-D8Z」
「スリットランプ SL-2G」
「スリットランプ SL-D701」
「スリットランプ SL-D301」の付属品


機械器具(31) 医療用焼灼器
高度管理医療機器 眼科用レーザー光凝固装置 JMDNコード 70634000

特定保守管理医療機器(設置) 「眼科用レーザー光凝固装置 PASCAL Synthesis」の付属品
平行視接眼鏡 PB-2

※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、平行視接眼鏡のみで構成される。

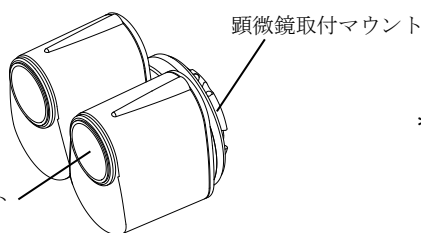

接眼レンズ取付マウント

2. 寸法: 98~119mm(W) × 80mm(D) × 83mm(H)

※※ 3. 使用環境

温度: 10°C~40°C

湿度: 30%~90%(結露なきこと)

気圧: 700hPa~1060hPa

※※ 本品は販売名

スリットランプ SL-D2

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)

スリットランプ SL-D4

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)

スリットランプ SL-D7

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)

スリットランプ SL-D8Z

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD8Z)

スリットランプ SL-2G

(医療機器届出番号 13B1X0003000SL2G)

スリットランプ SL-D701

(医療機器届出番号 13B1X00030SLD701)

スリットランプ SL-D301

(医療機器届出番号 13B1X00030SLD301)

眼科用レーザー光凝固装置 PASCAL Synthesis

(医療機器承認番号 22500BZX00470000)

の付属品である。

※【使用目的又は効果】

顕微鏡部の構成品である接眼鏡と交換し用いる接眼鏡。

※【使用方法等】

※※ <使用方法>

1. スリットランプから使用している接眼鏡を取り外します。
2. 本品をスリットランプに取り付けます。
3. 取り外した接眼鏡に付いている接眼レンズ(2ヶ)を取り外し、本品に取り付けます。

※【使用上の注意】

※※ 重要な基本的注意

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい