

機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ JMDN コード 35299000
「コンプビジョン ＣＶ－５０００」の付属品
パネルチャート ＰＣ－５０Ｓ

【形状・構造及び原理等】

１．構成

本品は、パネルチャート ＰＣ－５０Ｓのみで構成される。



２．電氣的定格

電源電圧：交流 100-240V

周波数：50-60Hz

電源入力：135VA

３．寸法及び質量

寸法：460 mm(W) × 65 mm(D) × 392 mm(H)

質量：6.0kg

詳細は「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

【使用目的、効能又は効果】

ＰＣ外付ＣＶ用電源ユニットに接続したパソコンまたはＰＣ内蔵ＣＶ用電源ユニットが出力する視力検査用視標データを表示し、視機能検査用視力表として用いる。

【品目仕様等】

検査視標： 視力値 0.02 ～ 2.0 の視力検査視標¹⁾、及び視機能検査視標 ＊
視標表示： 横一列、縦一列、一文字、Ｒ＆Ｇ、白黒反転、コントラスト変更、左右反転 ＊＊
輝度： 80 ～ 320 cd/m²
コントラスト： 85 % 以上
液晶ディスプレイ： 19 型
設置可能距離： 標準 5m (2.5 ～ 6m の間 25cm の間隔で設定可能、または 20ft.)

¹⁾ 設置距離 4.25m 以上の場合：視力値は 0.03 ～ 2.0 の視力検査視標、設置距離 2.75m 以下の場合：視力値 0.02 ～ 1.6 の視力検査視標となる。 ＊

【操作方法又は使用方法等】

＜使用環境＞

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

詳細はコンプビジョンＣＶ－５０００の「取扱説明書」の「各部の名称とその働き」、本品の「取扱説明書」の「各部の名称」、「使うための準備」を参照のこと。

【使用上の注意】

基本的注意事項

本体を壁に取り付ける場合には、構成品の壁掛け金具を用い、質量を支えることができる丈夫な壁に取り付けること（石膏ボードの壁には取り付けないこと）。

【本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。】

構成品の壁掛け金具は、向きに注意して壁に固定すること。

【本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。】

本体の検査距離の設定を、正しく設定すること。

【測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。】

液晶ディスプレイに傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないように注意すること。

【測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。】

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- １．機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
- ２．本体の検査距離の設定が正しいことを確認すること。
- ３．本体が壁または付属品のフロアスタンドに、確実に取り付けられていることを確認すること。
- ４．しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- ５．液晶ディスプレイが汚れたときには清掃すること。
- ６．使用しないときには、ダストカバーを被せること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「使うための準備」、「管理と点検」を参照のこと。

【包装】

包装単位：1 台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称および住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町 7 5 番 1 号

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 タカハタ電子

取扱説明書を必ずご参照下さい