



\* 1 0 1 - 0 1 7 A \*

\*2014年4月1日（第2版）

2012年9月7日（第1版）

【医療機器製造販売届出番号】13B1X00062GLV004

医療用品03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN：70976000）

## メドライン検査・検診用手袋（ビニル1）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、未滅菌の非天然ゴム製使い捨て検査・検診用手袋である。

#### 【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。歯科用手袋を除く。

#### 【品目仕様等】

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 老化前 | 引張強度 (MPa) | 9以上   |
|     | 破断時の伸び (%) | 300以上 |
| 老化後 | 引張強度 (MPa) | 9以上   |
|     | 破断時の伸び (%) | 300以上 |

#### 【操作方法又は使用方法等】

取出口より手袋を取り出し、着用する。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- 本品は単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 複数の患者には使用しないこと。
- 本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- 包装が破損・汚染・開封済み・水濡れしていた場合、又は製品に破損・汚損・ピンホール・異物などの異常が認められた場合は、使用しないこと。
- 製品本体の特性上、鋭利なものに接触すると破れたり、穴があくことがあるため、使用前に損傷やピンホールのないことを十分確認し、使用すること。
- 体質・使用状況によりかゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（Ⅳ型—遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）を引き起こすことがある。装着後数時間後から症状が発現することがある。

#### 相互作用

- 薬品、溶剤などにより膨潤したり浸透したりする場合があるため、十分状態を確認の上、使用すること。

#### その他の注意

- 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 貯蔵・保管方法：

- 室温下で、水濡れに注意し、冷凍、直射日光、熱源、紫外線、蛍光灯、X線、高温多湿、オゾンを避けて保管すること。

##### 使用の期限：

- 本品の使用期限は包装に記載。（自己認証による）

#### 【包装】

入り数は包装に記載。

#### 【\*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

##### 製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1

TEL. 03-5842-8800

##### 製造業者：

チャンスー キュアガード グローブ社（中華人民共和国）

Jiangsu Cureguard Glove Co., LTD.