



* 1 0 3 - 0 1 4 B *

**2014年4月1日（第3版）

*2012年11月1日（第2版）

【医療機器製造販売届出番号】13B1X00062STH002

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN:16779000)

メドライン サクションチューブ（未滅菌）


再使用禁止

【禁忌・禁止】

●再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

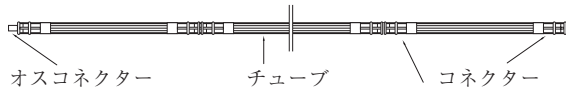

チューブ：ポリ塩化ビニル
コネクター：ポリ塩化ビニル
オスコネクター：ポリエチレン

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

2. 原理

吸引器等に接続することによって吸引する。

【使用目的、効能又は効果】

吸引器等との接続に用いる柔軟性のある未滅菌のチューブである。

【*操作方法又は使用方法等】


本品はディスプレイポザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

包装より取り出し、必要な長さにカットして、吸引器等の接続口に接続する。

必要に応じて滅菌する。滅菌する場合は必ずエチレンオキシドガス滅菌で行うこと。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 必要な長さにカットする場合は、コネクターの中央部を切断すること。

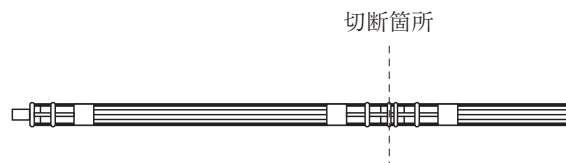

- 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 滅菌する場合は必ずエチレンオキシドガス滅菌で行うこと。
- 複数の患者には使用しないこと。
- 本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

- 包装が破損・汚損・開封済み・水濡れしていた場合、又は製品及び包装内に破損・汚損・異物などの異常が認められた場合は使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

その他の注意

- 本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
- 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法：室温下で、水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

使用の期限：本品の使用期限は包装に記載。（自己認証による。）

【包装】

入り数は包装に記載。

【**製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社
〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1
TEL. 03-5842-8800

製造業者：

コノドメディカル（中国）
Conod Medical Co., Ltd.