

ヘムコンTM パッチ
HemCon[®] Patch**再使用禁止****【禁忌・禁止】**

再使用、再滅菌はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、キトサンを含むパッド部と裏あてのフィルム部(ポリウレタン製)から構成される。



2. 寸法

本品のサイズは下記のとおりである。 (公差: ±10%)
(1) 4cm×4cm

厚さ: 3.0mm

3. 原理

本品を出血面(部位)に適応すると、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し、止血される。

【使用目的、効能又は効果】


血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部等のカテーテルなどの挿入部位を圧迫止血するために用いる。

【品目仕様等】

- ・生物学的安全性: 適合すること。
- ・無菌性保証水準(SAL): 10^{-6} に適合すること。


【操作方法又は使用方法等】

1. 通常の手順に従って、カテーテルを抜きます。

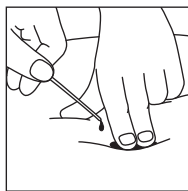


2. 穿刺部位の周囲に、おおよそ一円玉の大きさ(直径約 2cm)程度に少量の血液を残してください。

3. パッチ使用前に穿刺部位を洗浄したり、パッチを生理食塩水に浸さないでください。血液はパッチが出血部位に接着するため必要です。

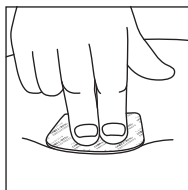


4. 印刷面を上に向けて、パッチを直接穿刺部位に通常の圧力で押しあててください。


5. 止血完了するまで、通常通り、用手圧迫止血を継続してください(押圧途中に確認のため、剥がしたりしないでください。通常 7-10 分)

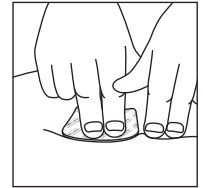

6. 必要に応じ、包帯等で圧迫を加えながら固定してください。

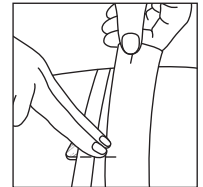

7. 48 時間以内に生理食塩水又は滅菌水でパッチを取り除いてください。退院患者等には、水道水などでパッチを濡しながら、注意して取り除くように指示してください。

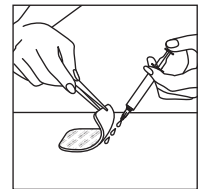

【注】本品は酢酸が含まれるため、においがありますが、製品に問題はありせん。

廃棄

本品使用後は医療施設では医療廃棄物として適切に処理してください。また、ご家庭では各自自治体の指定する方法に従って廃棄してください。

【使用上の注意】

- ・包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- ・手術に使用する際は、体内への留置が無いよう注意すること。
- ・本品は単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- ・室温で保管すること。

2. 使用期限

- ・包装に表示の使用期限内に使用すること。
- 〔自己認証(製造元データ)による〕

【包装】

5 枚／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11

電話 (03) 3663-2351 (代表)

発売元

ゼリア商事株式会社

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 9-7

製造元

ヘムコン メディカル テクノロジー

HemCon Medical Technologies, Inc.

アメリカ合衆国