


機械器具 36 医療用ピンセット
 一般医療機器 ピンセット JMDNコード: 35079001
ローディング鑷子
 (DK7726)

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 本品を改造（二次的加工）しないこと。
2. 併用医療機器
 本品はエイエムオー・ジャパン社が指定した製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

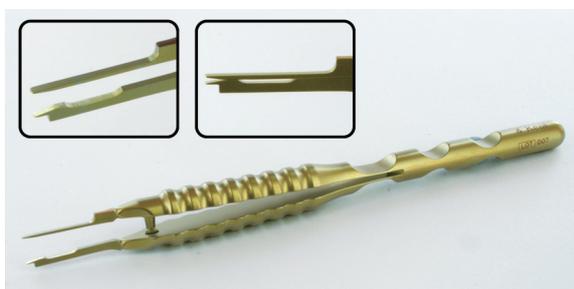

2. 原材料

チタン合金

3. 原理

先端で眼内レンズを把持する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、眼内レンズを把持し、折り畳むために用いる医療用ピンセットである。

【品目仕様等】

外観：目視検査にて使用上差し支えを生じるような、傷、ひび、歪み、損傷がないこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

眼内レンズを把持し、単回使用眼内レンズ挿入器にセットする。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- (1) 使用に際しては取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解すること。
- (2) 本品を使用する前に、必ず洗浄・滅菌をすること。
- (3) 使用する前に本品に傷や汚れ、変形等がないことを確認すること。破損、変形等が認められた場合は使用しないこと。
- (4) 本品を使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の応力を加えないこと。
- (5) 眼内レンズを本品にセットしたまま長時間放置しないこと。[押圧が長時間かかると、レンズの光学部に一時的な圧痕が残ることがある。]

3. 組み合わせて使用する医療機器

販売名	モデル	承認/認証番号
One series Ultra カートリッジ	1VIPR30	220ACBZX00107000
テクニス ワンピース	ZCB00	22000BZX01610000

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

本品はエイエムオー・ジャパン社が指定した製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[人体への障害、機器の破損につながるおそれがある]

2. その他の注意

本品を廃棄する際には、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (1) 必ず洗浄して汚れを落としてから保管すること。また、腐食を防ぐために保管期間に拘わらず乾燥すること。
- (2) 変形や損傷を与えるような状態で保管しないこと。
- (3) 汚れ及び錆・腐食等がみられたり、損傷した製品を正常な本品と一緒に保管しないこと。
- (4) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理を行うこと。
- (5) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (6) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所など本品が汚染される恐れのある環境に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

[洗浄方法]

適切なブラシを用いてしっかりとこすり洗いをする。

[洗浄の際の注意事項]

- (1) 使用後は速やかに洗浄すること。
- (2) 本品を洗浄する場合、非イオン性の洗浄剤を使用すること。酸性の洗浄剤及び生理食塩液は使用しないこと。[腐食やサビの原因となる。]
- (3) 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- (4) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄する場合、先端部どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
- (5) 材質の異なる器具と一緒に洗浄しないこと。[サビやキズなどの原因となる。]
- (6) 洗浄剤は水洗いで完全に洗い流すこと。[洗浄剤を完全に洗い流さないと腐食やサビの原因となる。]

取扱説明書を必ずご参照ください

- (7) 水洗い後、ガーゼ等で水滴を拭き取り、乾燥させること。
- (8) 洗浄、乾燥後は殺菌性の水溶性潤滑剤を塗布すること。[潤滑剤の膜は腐食やサビから器具を守る。]
- (9) 本品を洗浄及び保管する場合、滅菌トレーを用いることを推奨する。

[滅菌方法]

本品は使用前に各病院の滅菌の基準により高圧蒸気滅菌をすること。

- ・推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌 126℃、26分

[滅菌の際の注意事項]

滅菌を行う場合は完全に乾燥していることを確認の上行うこと。[乾燥していないと滅菌不良が発生する可能性がある。]

[包装]

1個/箱

[製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等]

[製造販売元]

エイエムオー・ジャパン株式会社

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1

電話：03-5402-8900

[製造元]

ダックワース アンド ケント社/英国

Duckworth and Kent Ltd.