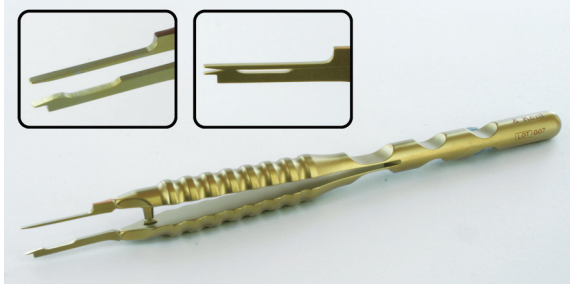


機械器具 36 医療用ピンセット
 一般医療機器 ピンセット JMDNコード：35079001
ローディング鑷子
 (DK7726)

【形状・構造及び原理等】**1. 形状****2. 原材料**

チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、眼内レンズを把持するために用いる医療用ピンセットである。

【使用方法等】**1. 使用方法**

眼内レンズを把持し、単回使用眼内レンズ挿入器に装填する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

眼内レンズを本品で長時間把持しないこと。[押圧が長時間かかると、レンズの光学部に一時的な圧痕が残ることがある]

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

使用する前に必ず適切な洗浄・滅菌をすること。[「保守・点検に係る事項」の項参照]

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

- 必ず洗浄して汚れを落とししてから保管すること。また、腐食を防ぐために保管期間に拘わらず乾燥すること。
- 変形や損傷を与えるような状態で保管しないこと。
- 汚れ及び錆・腐食等がみられたり、損傷した製品を正常な本品と一緒に保管しないこと。
- 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理を行うこと。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所など本品が汚染されるおそれのある環境に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】*** 使用者による保守点検事項****【洗浄方法】**

適切なブラシを用いてこすり洗いをする。

*** 【洗浄の際の注意事項】**

- 使用後は速やかに洗浄すること。
- 粘弾性物質等が付着した状態で本品を乾燥させないこと。
- 本品を洗浄する場合、非イオン性の洗浄剤を使用すること。酸性の洗浄剤及び生理食塩液は使用しないこと。[錆や腐食の原因となる]
- 洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄する場合、先端部どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
- 材質の異なる器具と一緒に洗浄しないこと。[錆や損傷などの原因となる]
- 洗浄剤は水で完全に洗い流すこと。[洗浄剤を完全に洗い流さないと錆や腐食の原因となる]
- 水洗い後、ガーゼ等で水滴を拭き取り、乾燥させること。
- 洗浄、乾燥後は殺菌性の水溶性潤滑剤を塗布すること。[潤滑剤の膜は錆や腐食から器具を守る]
- 本品を洗浄及び保管する場合、滅菌トレーを用いることを推奨する。
- 血液、体組織、生理食塩液又は粘弾性物質が付着して乾燥している場合には、30分以上洗浄剤に浸漬後、洗浄することが望ましい。

【滅菌方法】

本品を使用する前に各病院の滅菌の基準により高圧蒸気滅菌をすること。

推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌 126℃、26分

【滅菌の際の注意事項】

滅菌を行う場合は完全に乾燥していることを確認の上行うこと。[乾燥していないと滅菌不良が発生する可能性がある]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**【製造販売業者】**

エイエムオー・ジャパン株式会社

電話：03-5402-8900

【製造業者】

ダックワース アンド ケント社

Duckworth and Kent Ltd. 英国