

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

3 i ポリッシング プロテクター(サーテン システム)

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
IPPM1	サーテン UCLA ポリッシング プロテクター φ3.4 mm
IPPIA3	サーテン UCLA ポリッシング プロテクター φ4.1 mm
IPPIA5	サーテン UCLA ポリッシング プロテクター φ5.0 mm
IPPIA6	サーテン UCLA ポリッシング プロテクター φ6.0 mm

成分:ステンレススチール

基本的形状:



IPPM1

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F

電話: 03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク(Biomet 3i Inc.)

アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具で、補綴物等の研磨を行う場合に、アバットメントやゴールドシリンダーの底面部を保護するために用いる。

本品は全てサーテン システムに対応する製品である。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

1. 使用するアバットメントに適した種類及びサイズの本品を選択する。
2. 補綴物等の研磨時にサーテン UCLA アバットメントの底面部にサーテン ヘクストライン スクリューもしくはサーテン ワクシング スクリュー/ガイドピンを用いて固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、サーテンシステムに対応する製品である。使用するサーテン UCLAアバットメントに対して適切なサイズの本品を選択すること。
- 2) 折損、変形などの原因となるため必要以上の力を加えないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

- 1) 不具合
  - ・変形、破損、磨耗
- 2) 有害事象
  - ・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管方法
- ・室温保管