

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

ラッピング ツール(1)

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
MLT150 LT150 WLT10	ラッピング ツール(UCLAアバットメント用)
LT034	ラッピング ツール(スタンダードアバットメント用)
IMLT150 ILT150	サーテン ラッピング ツール

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F
電話：03-4333-9900

製造業者
バイオメット スリーアイ インク(Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国

成分:ステンレススチール(ガイド部:デルリン)

基本的形状:



【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料で、アバットメントのインプラント接合面を研磨するために用いる。
本品は金属部のない仕様のアバットメントもしくはシリンダーに対応する製品である。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

1. 使用するアバットメントやシリンダー及びサーテンシステム又はエクスターナルシステムに適する本品を選択する。
2. 研磨材を塗布した本品を技工用モーターに接続してアバットメントの底面を研磨する。ガイドは上部構造のアクセスホールから差込み使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は、金属部のない仕様のアバットメントもしくはシリンダー用のラッピング ツールである。折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
2. 不具合・有害事象
本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。
 - 1) 不具合
・変形、破損、磨耗
 - 2) 有害事象
・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法
・室温保管