

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

リーマー アンド ハンドル

【形状・構造及び原理等】

| 品番 | 種類 |
|--------|-------------------|
| RH600 | リーマー アンド ハンドル |
| IRH600 | サーテンリーマー アンド ハンドル |

成分: ハイスピードスチール

基本的形状:



RH600

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料で、鑄造後のスクリュー アクセスホールを拡孔・調整に用いる。

本品は、それぞれエクスターナル システム用とサーテン システム用がある。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

1. 適したシステム(エクスターナル、もしくはサーテン システム)の本品を選択する。
2. 機器の操作方法
 - 1) リーマーとハンドルを接続する。
 - 2) 手動で鑄造後のスクリューアクセスホールの内面を拡孔、調整スクリューの出し入れがスムーズになるよう仕上げる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品は、金属部のない仕様のアバットメントもしくはシリンダー用のリーマーアンド ハンドルである。折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
2. 不具合・有害事象
本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。
 - 1) 不具合
・変形、破損、磨耗
 - 2) 有害事象
・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法
・室温保管

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F
電話: 03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク(Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国