

類別等：機械器具（34）医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000
販売名：フィーリング・ナイフ

【禁忌・禁止】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール/セラミックコーティング（又はコーティング無）

シャフトについた刃によって組織等を切断する。



【使用目的又は効果】

外科的手術時に、組織等の切離に使用する。

【使用方法等】

本製品の先端部位に、切離する組織をあてがい。引く又は押して組織を切る。

【使用上の注意】

- 使用中は丁寧に扱い、投げたり落としたりしないで下さい。製品同士がぶつかったり、重なり合ったりしないよう注意し、先端部は上を向くように置いてください。
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。
- 洗浄剤は必ず医療用の洗浄剤をご使用ください。又、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用し洗浄、滅菌を行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 異なる金属とは一緒に洗浄しないでください。[電解沈着の原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 洗浄及び保管前に、接合部の緩みがないか確認してください。
- 洗浄後、速やかに乾燥させ保管すること。[サビやシミの防止のため]
- 保管前には、医療用防錆潤滑剤を使用してください。潤滑剤は洗浄により除去されますので、保存前には毎回潤滑剤を使用してください。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
- 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌

134℃ 5 分以上（推奨）

乾燥時間：10 分間

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

また、脊椎等の手術に使用する鋼製製品に関しては、クロイツフェルト・ヤコブ病の疑いがある患者の手術を行った際には、以下の消毒法に従い滅菌して下さい。

1. 3%SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）、5 分間、100℃
2. 高圧蒸気滅菌：132℃で 1 時間オートクレーブにて高圧滅菌する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：独国

製造業者名：FEHLING INSTRUMENTS GMBH（フィーリング社）

住所：Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany