

類別等: 機械器具 (42) 医療用剥離子  
一般医療機器 剥離子 70952000

販売名: フィーリング・クラニアル・キュレット


#### 【禁忌・禁止】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

#### 【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール/セラミックコーティング (又はコーティング無)

先端部位にて骨組織等を剥離する。

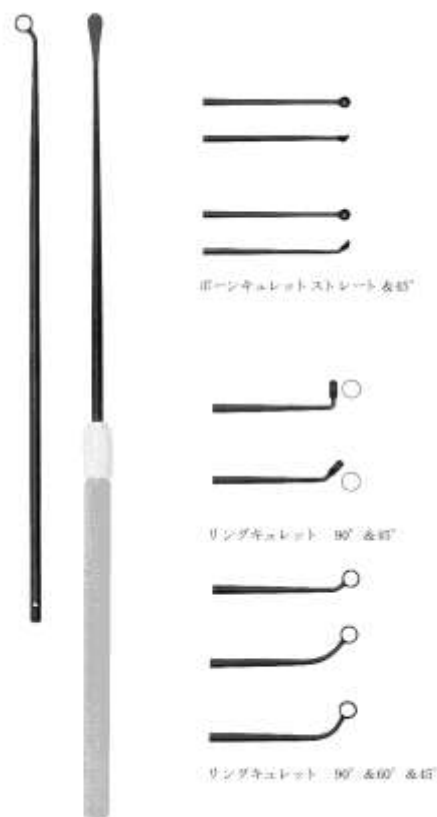

#### 【使用目的又は効果】

外科手術時において骨組織等を剥離又は除去する際に使用する。

#### 【使用方法等】

本製品の先端部位で、骨組織等を剥離又は除去する。

#### 【使用上の注意】

- 使用中は丁寧に扱い、投げたり落としたりしないで下さい。製品同士がぶつかったり、重なり合ったりしないよう注意し、先端部は上を向くように置いてください。
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。
- 洗浄剤は必ず医療用の洗浄剤をご使用ください。又、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用し洗浄、滅菌を行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれている

と、サビやシミの原因となります。]

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 異なる金属とは一緒に洗浄しないでください。[電解沈着の原因となります。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

#### 【保守・点検に係る事項】

- 洗浄及び保管前に、接合部の緩みがないか確認してください。
- 洗浄後、速やかに乾燥させ保管すること。[サビやシミの防止のため]
- 保管前には、医療用防錆潤滑剤を使用してください。潤滑剤は洗浄により除去されますので、保存前には毎回潤滑剤を使用してください。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
- 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌

134℃ 5分間以上 (推奨)

乾燥時間: 10分間

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法 (エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌) に準じて下さい。

また、**脊椎等の手術に使用する鋼製製品**に関しては、クロイツフェルト・ヤコブ病の疑いがある患者の手術を行った際には、以下の消毒法に従い滅菌して下さい。

1. 3%SDS (トデシル硫酸ナトリウム)、5分間、100℃
2. 高圧蒸気滅菌: 132℃で1時間オートクレーブにて高圧滅菌する。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名: 独国

製造業者名: FEHLING INSTRUMENTS GMBH (フィーリング社)

住所: Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany