

器49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
一般医療機器 ガイド (37150000)

B i o J e t 生検用テンプレート

【警告】

本品は未滅菌品のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。

使用後は直ちに中性洗剤と細毛ブラシでニードルホールを洗浄し、洗浄後は清潔な布でふき取ること。

【形状・構造及び原理等】

本品は、超音波ガイド時の画像上のプロットと固定したテンプレートのニードルホールの位置とを対応させることにより、前立腺の正確な位置へと生検針を導くために用いる器具である。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な状態で保管すること。


**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：タカイ医科工業株式会社

住所：東京都文京区湯島 2-31-25

連絡先：03-3814-7761

製造業者：Medical Targeting Technologies GmbH
(ドイツ)

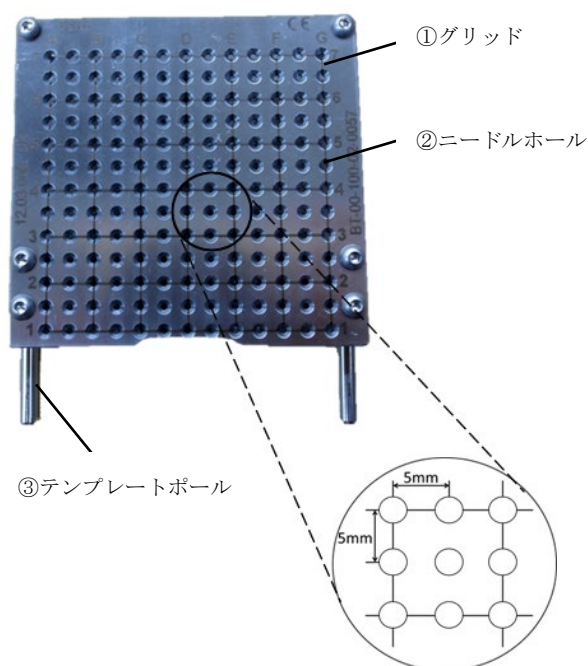

【使用目的又は効果】

本品は前立腺生検時に、生検針を適正な進路に導くために用いる器具である。使用する際は、機器に固定して用いる。

【使用方法等】

1. テンプレートボールを専用ステッパに装着する。
2. 専用ステッパのネジを回してテンプレートを固定する。
3. 超音波画像とテンプレートのプロットの位置とが対応していることを確認し、生検針を挿入する。

洗浄及び滅菌方法

使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。

プレバキューム：133℃、10分以上

滅菌条件：134℃以上