

## NAV1ナビゲーション用サクシオンチューブ

### 【形状・構造及び原理等】

#### ＜外観及び形状＞

※代表的なタイプを下記に示す。

##### (1) 光学式ナビゲーション用サクシオンチューブ



##### (2) 磁場式ナビゲーション用サクシオンチューブ



#### ＜原材料＞

ステンレス鋼


### 【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡手術時にナビゲーションシステムと共に用い、組織または異物の吸引を調節または指示する器具である。本品は、再使用可能である。

### 【使用方法等】

#### 1. 光学式ナビゲーション用サクシオンチューブ

- (1) 本品から固定ネジを取り外し、インスツルメントトラッカーのインスツルメント接続コネクタに本品をはめ、固定ネジで固定する。インスツルメントトラッカーは、必ず本品の先端部と反対方向を向くようにする。
- (2) 患者トラッカーのインスツルメント登録用ノッチに本品の先端部を触れることにより、本品を登録する。

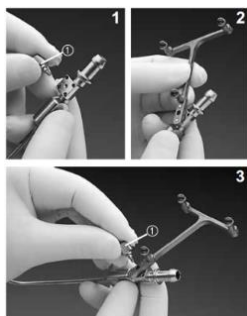

- (3) 本品を吸引装置へ接続する。
- (4) 使用後は、本品から固定ネジを取り外し、インスツルメントトラッカーを外す。所定の方法で消毒・滅菌を行う。

#### 2. 磁場式ナビゲーション用サクシオンチューブ

- (1) 本品のコネクターをNAV1磁場式モジュールのインスツルメント接続コネクタに接続し、ステータスランプがグリーンになっていることを確認する。
- (2) 本品を吸引装置へ接続する。
- (3) 本品の先端部をEM患者トラッカーのインスツルメント登録用ノッチに触れることにより、本品を登録する。
- (4) 使用後は、接続を取り外し、所定の方法で消毒・滅菌を行う。

### \*\*【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

1. 組織・粘膜を傷つける恐れがあるため、挿入部に傷、めくれ等がなく、滑らかであることを必ず確認すること。
2. 破損等の原因となるため、磁場式ナビゲーション用サクシオンチューブを超音波洗浄器にかけないこと。

3. 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・破損を招き、故障につながる恐れがある。
4. 当社指定の機器以外と組み合わせて使用しないこと。
5. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織液及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
7. 塩素系及びヨウ素の消毒剤は腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
8. 分解や組立ての際は、本品や患者トラッカーを曲げないように注意すること。曲がってしまった場合は、元の状態に戻さないこと。
9. 磁場式ナビゲーションシステムを使用する場合、機器のケーブルは、磁場発生器のケーブルと平行状態または近傍（30mm未満）にならないように注意すること。
10. 磁場式ナビゲーションシステムを使用する場合、本品をMR機器等の強い電磁波に晒さないこと。また、磁場発生器の上に直接置かないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際は、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に係わらず必ず乾燥をすること。
2. 滅菌済のものを保管の際は、再感染を防止するために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
3. 耐用期間内の使用であっても、点検した結果、わずかも異常が見られた場合は使用を中止すること。尚、これは推奨された方法及び環境で管理・使用された場合であり、使用状況等により差異を生じることがある。
4. 耐用年数〔自己認証（当社データ）による〕  
磁場式ナビゲーション用サクシオンチューブ：30回

### \*【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
3. 使用後は、速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
4. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 付着物は修復不能な破損の原因になるので、器具は使用後、速やかに洗浄の準備をすること。

#### 6. 洗浄方法 (1) 自動洗浄器

- ① 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
- ② 適切なラック（※）を使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。（他の器具と重なり合うことにより破損の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する。）  
※光学式ナビゲーション用サクシオンチューブ：クリーニングトレイ（39502NAV2）
- ③ 器具の接続部を開放し、分解してラックに入れること。
- ④ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

- (2) 超音波洗浄器（光学式ナビゲーション用サククションチューブのみ）
- (3) マニュアル洗浄
- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行う。
  - ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
  - ③ 管腔内を洗浄するため適切なブラシ（※）やクリーニングピストル（※）を準備すること。  
※光学式ナビゲーション用サククションチューブ：管腔のブラッシング[ブラシ（27651B）、クリーニングピストル（27660）]  
※磁場式ナビゲーション用サククションチューブ：表面のブラッシング[ブラシ（27652、27650B）]、管腔のブラッシング[ブラシ（27651AS）]
  - ④ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器を準備すること。
  - ⑤ 洗浄手順
    1. 器具の接続部をすべて分解する。
    2. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。  
水温は43℃前後（暖かいと感じる温度）が適温である。  
薬剤による器具の破損の可能性がある為、溶液には60分以上浸漬したままにしないこと。
    3. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
    4. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
    5. ホコリの出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。
7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ
- (1) 外観の目視（特に体内に入る部分は入念に）確認、可動部の機能確認を行うこと。
  - (2) プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性（硬化の有無）・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。
  - (3) 固定ネジ等すべての可動部分には、滅菌による熱損傷を防止する為、専用のオイル（※）を必ず塗布（オートクレーブ滅菌のみ有効）すること。  
※光学式ナビゲーション用サククションチューブ：専用オイル（27656B）
8. 洗浄剤
- (1) 製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。
- 注1: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。
- (1) エチレンオキサイドガス滅菌方法  
本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキサイドガス滅菌を行う。  
＜滅菌条件①＞
    - ・ガス混合物：エチレンオキサイド100%
    - ・ガス濃度：725±30mg/L
    - ・温度：55℃
    - ・湿度：≥70%RH
    - ・圧力：0.09MPa
    - ・時間：1～2時間（滅菌機材による）＜滅菌条件②＞
    - ・ガス濃度：600～700mg/L
    - ・温度：40～60℃
    - ・湿度：50～60%RH
    - ・圧力：0.1MPa
    - ・時間：3～6時間＜ガス抜去方法＞  
51～59℃で12時間のエアレーションを行う。  
（推奨 55℃で12時間）
  - (2) オートクレーブ滅菌方法  
本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。  
＜滅菌条件＞
    - ・温度：134～137℃
    - ・時間：4～18分間

※真空式高圧蒸気滅菌（pre-high vacuum）方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

- (3) プラズマ滅菌（ジョンソン・エンド・ジョンソン社/販売名「ステラッド100S、NX又は100NX」）

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

・温度：約45～55℃（機種による）

・湿度：約10%RH

・時間：28～105分（機種による）

- (4) 薬液消毒方法

容器を2個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。

薬液に30分浸した後、本品を滅菌水に移し、約5分間浸す。

＜消毒条件＞

・使用薬液：2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を60分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社

TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）

国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 427

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。