

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

スマートスコープ

【警告】

1. 挿入部に傷、めくれ等がなく、滑らかであることを必ず確認すること。[組織・粘膜を傷つける恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

※代表的なタイプを下記に示す。

＜外観＞



＜付属品＞



＜各部の名称、機能及び動作＞

番号	名称	機能及び性能
①	スマートスコープ	内視鏡と市販のスマートフォンを接続するアダプター
②	スタンドアダプターリング 取外しネジ	ネジを緩めることにより、スタンドアダプター③の位置を変えることができる
③	スタンドアダプター	市販のカラ用スタンド（三脚）を取り付ける
④	テレスコープホルダー	内視鏡を固定する
⑤	スマートスコープ 固定ネジ	スマートスコープ ①を固定する
⑥	スマートフォンホルダー	市販のスマートフォンを取り付ける

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡と市販のスマートフォンを接続し、内視鏡で得た画像をスマートフォンで見ることを可能にするアダプターである。

【使用方法等】

1. スマートフォンをスマートフォンホルダー⑥に取付ける。
2. スマートスコープ①をスマートスコープ固定ネジ⑤に固定する。
3. テレスコープホルダー④を開き、内視鏡の接眼部をスマートスコープ①に取付ける。
4. スマートフォンのスイッチを入れる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

2. 本品は、滅菌を行うことができないため、清潔領域での手術及び侵襲手術には使用しないこと。
3. 本品は、体液や分泌液、骨に触れないようにし、汚れた手袋で触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際は、拭き消毒又は清掃をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に係わらず必ず乾燥をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず粗い表面や鋭い角、エッジのめくれ、部品の突出がないことを確認し、外観及び動作に異常がないことを確認すること。
2. 本品は、非刺激性の洗浄剤・消毒剤で湿せた布や消毒布を使用して、機器表面を拭き、消毒/清掃を行うこと。先端部および基部のガラス面は、アルコールに浸した綿棒を使用し、消毒/清掃を行うこと。
3. 破損する恐れがあるため、本品は浸漬消毒や滅菌を行わないこと。
4. 本品が血液や体液に触れた場合、速やかに廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL: 03-6380-8622

製造業者: KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名: Germany

添付文書番号: KSTJ - 450