

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器 70465000


KARL STORZ アダプター 38112C 用

再使用禁止

【禁忌・禁止】

滅菌済みディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

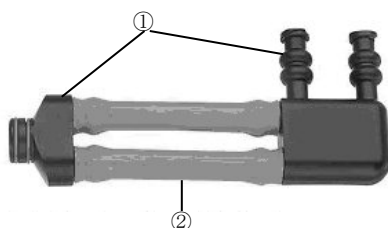

＜モジュラーハンドルとの接続図＞



【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、或いは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 製品は5℃から20℃、湿度30%以下で保管することを推奨する。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

番号	名 称	機能及び動作	原材料
①	コネクター	灌流・吸引カニューレ及び、サクシオン・イリゲーションチューブとの接続。	ABS樹脂※
②	シリコンチューブ	灌流・吸引液が通る。	シリコンゴム※

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は、灌流・吸引用ハンドルに接続して使用する滅菌済みのアダプターである。

【使用方法等】

＜使用前準備＞

1. 滅菌包装を開けて無菌的に本品を取り出す。
2. 包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

＜使用時＞

1. モジュラーハンドルの開口部を開き、適切な位置に本品を装着させる。
2. モジュラーハンドルに灌流・吸引カニューレ及び、サクシオン・イリゲーションチューブを接続する。
3. モジュラーハンドルを操作してイリゲーション及びサクシオンを行う。

＜使用后＞

1. 本品を取り付け手順とは逆の手順にて、モジュラーハンドルより取り外し、適切な方法により廃棄を行う。
2. 本品は、滅菌済みディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
TEL:03-6380-8622

製造業者:KARL STORZ SE & Co. KG(カールストルツ社)
国名:Germany

添付文書番号:KSTJ-Z133