

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

KARL STORZ 組織回収フィルタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

本品は、体液・組織を回収するために、吸引器とともに使用する。

【使用方法等】

1. キャップを取り外し、付属のアダプタを取り付ける。
2. アダプタに患者側チューブを接続する。
3. 組織回収カップを排液ボトルに取り付ける。
4. 使用後は、組織回収カップにキャップ及びスタンドを取り付け、回収された組織を保管する。
5. 組織を適切な方法で処理し、本品を廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 接続部の径が合わないときは、無理に使用しないこと。
2. 患者側チューブ、排液ボトルが確実に接続されていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 室温下で保管すること。
2. 水に濡れないように保管すること。
3. 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
4. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL: 03-6380-8622

製造業者: KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名: Germany

添付文書番号: KSTJ - Z135