

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

## KARL STORZ イリゲーションアダプタ

### 【形状・構造及び原理等】



| 番号 | 名 称     | 機 能 及 び 動 作                 | 原 材 料       |
|----|---------|-----------------------------|-------------|
| ①  | ハンドル    | バルブの付いた本体部分                 | ポリフェニルサルホン※ |
| ②  | ルアーロック部 | チューブ又はルアーロックコネクタ付チューブを接続する。 | ステンレス鋼※     |

※:組織、体液又は血液に間接的に接触することがある部分

### 【使用目的、又は効果】

内視鏡下手術の際、カニューレ等に接続して洗浄液等の吸引又は注入の操作を行うためのアダプタである。

### 【使用方法等】

- 使用前に所定の方法で滅菌を行う。
- カニューレ等を本品の接続部に接続する。
- ルアーロック部にシリコンチューブ等を接続し、カニューレ等を使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 本品は未滅菌品のため、使用前に所定の方法で滅菌を行うこと。
- 滅菌は常に同一の方法で行うことを推奨する。〔異なる滅菌方法を実施すると、構造物に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障につながる可能性が高い〕

### 【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 術前に傷、ひび、へこみ、ぐらつき等が無いことを確認し、瑕疵又は破損の徴候が少しでも認められたら使用しないこと。
- 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに水洗いすること。
- 各部にぐらつき、亀裂、さび等がないことを確認する。
- 本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保存期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- 滅菌を行ったものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

- 保守点検は、次の点に注意すること。
  - 本品は必ず定期点検を行うこと。
  - しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に動作することを確認すること。
- 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
- 改造しないこと。
- 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
- 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。（付着物は修復不能な損傷の原因になる。）
- 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

### 7. 洗浄方法

#### (1) 自動洗浄器

- 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管路を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
- 適切なラックを使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。（他の器具と重なり合うことにより損傷の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する。）
- 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

#### (2) 超音波洗浄器

プラスチック等軟性部品には使用しないこと。（超音波振動を吸収するためには効果が無いのみならず、材質の劣化を促進する可能性がある。）

#### (3) マニュアル洗浄

- 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行なう。
- 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- 管路内を洗浄するため適切なブラシやクリーニングピストルを準備すること。
- 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器を準備すること。
- 洗浄手順

- 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温は35～40℃前後（暖かいと感じる温度）が適温である。薬剤による器具の損傷の可能性がある為、溶液には60分以上浸漬したままにしないこと。
- スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
- 管路内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
- 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
- 埃の出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

#### 8. 洗浄後の器具の点検とお手入れ

- 外観の目視（特に体内に入る部分は入念に）確認、可動部の機能確認を行うこと。（異常が見られたら使用を中止し、交換すること。）

- (2) プラスチック又はシリコーン部品の変色・変質・柔軟性(硬化の有無)・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。

#### 9. 洗浄剤

- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。(材質に損傷を与える可能性が高い。)
- (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
- (3) 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用すること。

#### 10. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。

注: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

##### (1) エチレンオキシドガス滅菌方法

本品を滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

方法1:

<滅菌条件>

- ・ガス混合物: エチレンオキシド 100 %
- ・ガス濃度 : 725±30 mg/L
- ・温度 : 55 °C
- ・湿度 : ≥70 %RH
- ・圧力 : 0.09 MPa
- ・時間 : 1~2 時間(滅菌機材による)

<ガス抜去方法>

51~59℃で 12 時間のエアレーションを行う。(推奨 55℃で 12 時間)

又は

方法2:

<滅菌条件>

- ・ガス濃度 : 600~700 mg/L
- ・温度 : 40~60 °C
- ・湿度 : 50~60 %RH
- ・圧力 : 0.1 MPa
- ・時間 : 3~6 時間

<ガス抜去方法>

51~59℃で 12 時間のエアレーションを行う。(推奨 55℃で 12 時間)

##### (2) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

<滅菌条件>

- ・温度 : 134 °C
- ・圧力 : 2 気圧
- ・時間 : 5~8 分間

※真空式高圧蒸気滅菌(pre-high vacuum)方式のオートクレーブを使用すること。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

##### (3) プラズマ滅菌(ジョンソン・エンド・ジョンソン社/販売名「ステラッド」100S、NX又は100NX)

本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

<滅菌条件>

- ・温度 : 45~55℃(機種による)
- ・湿度 : 約 10%RH
- ・時間 : 28~105 分(機種による)

##### (4) 薬液消毒方法

容器を2個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。薬液に30分浸した後、本品を滅菌水に移し、約5分間浸す。

<消毒条件>

- ・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を60分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

#### 【包装】

1 個/箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社

TEL: 03-6380-8622

製造業者: KARL STORZ SE & Co. KG(カールストルツ社)

国名: Germany

添付文書番号 : KSTJ - Z138